



KATALOG INTERAKTYWNY

L.p. Artykuł.
([Kliknij na interesujący Cię sprzęt, by automatycznie przejść do jego opisu ze zdjęciem.](#))

I.	Sprzęt				
1	D-M-S Zestaw mobilny do wlewów dożwaczowych (Drenching-Mobile-Set)				
2	D-M-S Klucz nosowy dla bydła				
3	D-M-S Membrana gumowa nitrylowa do pompy D-M-S				
4	Golarka weterynaryjna				
5	Nożyki do golarki weterynaryjnej - kpl. 10 sztuk				
6	Igła ASKO				
7	Igła Gerlacha				
8	Igła Bühner 30 cm do taśmy pochwowej				
9	Taśma pochwowa 4 mm x 5 m dla owiec				
10	Taśma pochwowa 6 mm x 5 m dla krów				
11	Igła metalowa wielokrotnego użytku - 1,4x25 17G				
12	Igła metalowa wielokrotnego użytku - 1,6x30 16G				
13	Igła jednorazowego użytku - 0,6x16				
14	Igła jednorazowego użytku - 0,6x25				
15	Igła jednorazowego użytku - 1,2x40				
16	Igła jednorazowego użytku SUPRA - 1,2x60				
17	Igła jednorazowego użytku SUPRA - 1,2x75				
18	Igła jednorazowego użytku SUPRA - 1,2x100				
19	Igła jednorazowego użytku SUPRA - 1,5x100				
20	Igła jednorazowego użytku - 1,6x25				
21	Igła jednorazowego użytku SUPRA - 1,8x60				
22	Igła jednorazowego użytku SUPRA - 2,0x60				
23	Igła jednorazowego użytku SUPRA - 2,0x100				
24	Igła jednorazowego użytku SUPRA - 2,0x120				
25	Igła chirurgiczna SER-WIE - okrągła - 1 szt. - 1/2 lub 3/8 koła - różne wielk.				
26	Igła chirurgiczna SER-WIE - okrągła - 12 szt. - 1/2 lub 3/8 koła - różne wielk.				
27	Igła chirurgiczna SER-WIE - trójkątna - 1 szt. - 1/2 lub 3/8 koła - różne wielk.				
28	Igła chirurgiczna SER-WIE - trójkątna - 12 szt. - 1/2 lub 3/8 koła - różne wielk.				
29	Nić chirurgiczna SUPRAMID EP 4 - 50 m				
30	Nić chirurgiczna SUPRAMID EP 6 - 50 m				
31	Nić chirurgiczna wchłaniana SERASYNTH EP 5 -15 m				
32	Kaniule strzykowe do opróżniania ćwiartki wymienia u krowy - kpl. 10 szt.				
33	Kleszcze maciczne Hauptner				
34	Łapki gumowe do kleszczy macicznych Hauptner - kpl. (para)				
35	Kolczykownica				
36	Igła do kolczykownicy				
37	Kolczyk trapezowy dla loch bez nadruku - kpl. ♀+♂				
38	Kolczyk trapezowy dla loch z nadrukiem - kpl. ♀+♂				
39	Marker do kolczyków, czarny				
40	Laat VS Oprawa strzykawki "Laat long"				
41	Laat VS Wkład sterylny do strzykawki "Laat long"				
42	Laat VS Znacznik "Long marker" 80 cm				
43	Laat VS Spray do znacznika "Long marker" - czerwony				
44	Laat VS Spray do znacznika "Long marker" - niebieski				
45	Laat VS Oprawa strzykawki "Laat visco blue" - 1 ml				

46	Laat VS Oprawa strzykawki "Laatvisco red" - 2 ml				
47	Laat VS Wkład sterylny do strzykawki "Laat visco"				
48	Laat VS Wkład sterylny "SOCO-TOP"				
49	Lanca elastyczna do szczepień 90 cm				
50	Linka porodowa nylonowa z uchwytem - 2 szt.				
51	Mankiet repozycyjny dla loch 35x65 cm				
52	Pętla ryjowa Hauptner - 60 cm				
53	Linka z uchwytem do pętli ryjowej Hauptner				
54	Pętla ryjowa Hauptner - krótka				
55	Pojemnik do moczu 100 ml				
56	Pompa do pobierania płynu żwaczowego i wlewów dożwaczowych				
57	Pompa - cz. zamienna - dolny konus pompy z uszczelką				
58	Pompa - cz. zamienna - nakrętka dolna				
59	Pompa - cz. zamienna - nakrętka górna				
60	Pompa - cz. zamienna - rękojeść tłoka				
61	Pompa - cz. zamienna - śruba mocująca tłok				
62	Pompa - cz. zamienna - tłoczek				
63	Pompa - cz. zamienna - trójnik z uszczelką				
64	Pompa - cz. zamienna - uszczelka duża (biała)				
65	Pompa - cz. zamienna - uszczelka mała (czarna)				
66	Probówki neutralne, sterylne N 95 n - 12 ml				
67	Probówki do mleka - bakteriologia - ze śr. bakteriostatycznym - 12 ml				
68	Probówki do mleka - biochemia/serologia - ze śr. konserwującym NaN3 - 10 ml				
69	Probówkostrzykawka - EDTA - Hematologia E792-7,5ml- Etykieta papierowa				
70	Probówkostrzykawka - Heparyna litowa - P 790 - 4,9ml- Etykieta papierowa				
71	Probówkostrzykawka - Surowica - S790 - 4,9ml- Bez etykiety				
72	Probówkostrzykawka - Surowica - S790 - 4,9ml- Etykieta papierowa				
73	Probówkostrzykawka - Surowica - S790 - 4,9ml- Etykieta foliowa 2 x kod				
74	Probówkostrzykawka - Surowica - S792 - 7,5ml- Bez etykiety				
75	Probówkostrzykawka - Surowica - S792 - 7,5ml- Etykieta papierowa				
76	Probówkostrzykawka - Surowica - S792 - 7,5ml- Etykieta foliowa 2 x kod				
77	Kartoniki na 50 szt. probówek/probówkostrzykawek wys. 120 mm				
78	Kartoniki na 50 szt. probówek/probówkostrzykawek wys. 140 mm				
79	SEPTOR 1 - płyta przepędowo-sortująca - czarna 67x200				
80	SEPTOR 2 - płyta przepędowo-sortująca - czarna 75x200				
81	SEPTOR 3 - płyta przepędowo-sortująca - czarna 85x200				
82	Skalpel do cięcia cesarskiego				
83	Sonda do pobierania płynu żwaczowego				
84	Sonda do wlewów dożwaczowych bez przewodnicy				
85	Sonda do wlewów dożwaczowych z przewodnicą				
86	Sonda do wlewów dożwaczowych dla cieląt bez osłony				
87	Sonda do wlewów dożwaczowych dla cieląt z osłoną				
88	Sonda przeciwwzdęciowa dla bydła z osłoną				
89	Spinki pochwowe Bovivet 55-75 mm- op. 12 szt.				
90	SplaylegSTOP – 20 pasków korekcyjnych				
91	Stetoskop weterynaryjny dla dużych zwierząt				
92	Oliwka słuchawkowa do stetoskopu dla dużych zwierząt - 1 szt.				
93	Strzykawka samorepetująca Prima Tech BMV (0,5 ml; 1 ml; 2ml; 5ml)				
94	Strzykawka samorepetująca Prima Tech Vaccinator (0,5 ml; 2 ml; 5 ml)				
95	Sztyfty strzykowe silikonowe - kpl. 10 szt.				
96	Sztyfty strzykowe woskowe z nitką - kpl. 24 szt.				

97	Tbc Cylinder do strzykawki pistoletowej MUTO do Tbc				
98	Tbc Głowica dezynfekująca Sterimatic do strzykawki MUTO Tbc - kpl. 5 szt.				
99	Tbc Igła do strzykawki MUTO – Tbc + Sterimatic - 0,6x5 mm Luer				
100	Tbc Igła do strzykawki MUTO – Tbc + Sterimatic - 0,7x15 mm Luer				
101	Tbc Igła do Tbc - 0,7x4 mm Luer				
102	Tbc Nasadka Sterimatic do strzykawki MUTO Tbc - komplet				
103	Tbc Strzykawka pistoletowa MUTO do Tbc Hauptner				
104	Tbc Suwmiarka analogowa do Tbc Hauptner				
105	Tbc Suwmiarka cyfrowa do Tbc Hauptner				
106	Tbc Zestaw - Strzyk. MUTO + suwmiarka analogowa + Sterimatic + kuferek				
107	Tbc Zestaw - Strzyk. MUTO + suwmiarka cyfrowa + Sterimatic + kuferek				
108	Trokar śrubowy Buff 135 mm				
109	Wlewnik weterynaryjny				
110	Zestaw „Prolaps – Set” (W, T, L)				
111	Zestaw do pobierania płynu ustnego "OF" u świń				
112	Zestaw sekcyjny do dużych zwierząt				
113	Zestaw trokarowy do fiksacji trawieńca - komplet				
114	Zawlecзка do fiksacji trawieńca - kpl. (para)				
115	Zawlecзка do fiksacji trawieńca wg Janowitza - kpl. 5 szt.				
116	Zgłębnik gumowy 150 cm, Ø zewn. 12 mm				
117	Zgłębnik gumowy (sonda żołądkowa) 250 cm, Ø 9/15 mm				
118	Zgłębnik gumowy (sonda żołądkowa) 300 cm, Ø 10/16 mm				
119	Zestaw Dr. Fritza do repozycji trawieńca metodą Janowitza				
II. Odzież ochronna					
1	Buty jednorazowego użytku foliowe Krutex z gumką - 50 szt.				
2	Czepek jednorazowego użytku chirurgiczny				
3	Fartuch ginekologiczny nieprzemakalny, zielony 130, 140 cm				
4	Kalosze Dunlop z ochroną stopy, rozmiar 39-47/48				
5	Kalosze Dunlop z ochroną stopy, rozmiar 49/50				
6	Kalosze Dunlop z ochroną stopy Purofort Thermo Plus				
7	Kombinezon ochronny jednorazowego użytku biały, rozmiar M, L, XL, XXL				
8	Kombinezon ochronny jednorazowego użytku zielony, rozmiar M, L, XL, XXL				
9	Kombinezon weterynaryjny, rozmiar XXS, XS, S, M, L, XL, XXL				
10	Rękawice jedn. uż. lateksowe, rozmiar M, L, XL				
11	Rękawicejedn. uż. nitylowe, rozmiar M, L, XL				
12	Rękawicejedn. uż. winylowe pudrowane, rozmiar M, L, XL				
III. Preparaty					
1	Antycit - BOVERA - 400 g torba				
2	Antydiarr - BOVERA - 600 g torba				
3	Diaretum - BOVERA - 400 g torba				
4	Fermenit - BOVERA - 600 g torba				
5	Krodigest - BOVERA - 600 g torba				
6	Puerperal - BOVERA - 600 g torba				
7	Canivera - Provital- 400 g puszka				
8	Diavet 400 g puszka				
9	Diavet 1 kg puszka				
10	Diavet 2,5 kg wiaderko				
11	Mammoderm 1.000 ml butelka plastikowa				
12	Virocid (5 l)				
Do przesyłki poniżej 500,00 zł wartości faktury netto doliczane są koszty dostawy. Opisy artykułów wraz ze zdjęciami znajdują się w Internecie na www.basko-vet.com . Zamówienia można składać telefonicznie, mailowo lub faksem. KLIKNIJ W OBRAZEK PO PRAWEJ BY PRZEJŚĆ DO STRONY ZAMÓWIEŃ→		Zamawiam...			

D-M-S Zestaw mobilny do wlewów dożwaczowych (Drenching-Mobile-Set)

Sprzęt do wlewów dożwaczowych zamontowany na wózku służy przede wszystkim do użytku fermowego.



Zestaw składa się z:

- wózka transportowego
- beczki o pojemności 45 lub 70 l osadzonej na wózku
- pompy ręcznej zamocowanej na pokrywie beczki
- sondy z przewodnicą do wlewów dożwaczowych

Pompa zastosowana w zestawie jest bardzo wydajna i odporna na wszelkie substancje chemiczne oraz ziarnistości znajdujące się w przepompowywanym roztworze.

Sondę wprowadza się przez przełyk do żwacza poprzez przewodnicę zabezpieczającą ją przed zgryzieniem. Główka sondy jest tak uformowana, aby przy przechodzeniu przez gardło nie doszło do jej przypadkowego wprowadzenia do tchawicy. Pozwala ona także, w większości przypadków, na obserwację przesuwającej się w przełyku sondy, po lewej stronie szyi. W chwili wprowadzania sondy do przełyku szyja i głowa krowy powinny być wyprostowane i utrzymywane w pozycji poziomej. Przewodnicę sondy, po wprowadzeniu do pyska, mocuje się za pomocą klucza nosowego. Następnie sondę, po wprowadzeniu do żwacza, przypina się do przewodnicy, aby zabezpieczyć przed jej wysuwaniem się ze żwacza i przełyku, co pozwala operatorowi na wpompowywanie przygotowanego roztworu bez konieczności stałego kontrolowania osadzenia sondy. Po zakończonym zabiegu, a przed wyciągnięciem sondy z przewodnicą z pyska, należy wyciągnąć sondę ze żwacza i przełyku, tak by całkowicie schowała się w przewodnicy, co zabezpieczy wąż sondy przed zgryzieniem.

Wlewy dożwaczowe, czyli drenching to:

- wzmocnienie krowy po porodzie
- zapewnienie prawidłowego przebiegu laktacji
- redukcja lewostronnego przemieszczenia trawienia
- brak reakcji smakowej na wprowadzane preparaty
- znikome niebezpieczeństwo zalenia płuc
- niski koszt i łatwe wykonanie zabiegu, także w zaleganiu

[POWRÓT DO LISTY](#)

D-M-S Klucz nosowy dla bydła



- wykonany ze stali nierdzewnej
- posiada sprężynową blokadę zamknięcia
- standardowe wyposażenie sondy do wlewów dożwaczowych z prowadnicą oraz Drenching-Mobile-Set

[POWRÓT DO LISTY](#)

D-M-S Membrana gumowa nitrylowa do pompy D-M-S



- Część wymienna do pompy Drenching-Mobile-Set
- Guma nitrylowa stosowana jest wszędzie tam, gdzie wymaga się od wyrobów gumowych pracy w ścisku, przy dużych ciśnieniach

[POWRÓT DO LISTY](#)

Golarka weterynaryjna



Golarka z wymiennym ostrzem, zbudowana w większości z metalu, jest bardzo odporna na zużycie. Służy do golenia na mokro i pozwala na usuwanie owłosienia w bezpieczny sposób. U zwierząt z długą bądź twardą sierścią nie ma konieczności jej wystrzyżenia przed goleniem. Nożyk układała się w taki sposób, aby umożliwić jak najbezpieczniejsze golenie z minimalnym ryzykiem skaleczenia.

Uwaga - komplet nożyków (kaseta 10 szt.) do zakupienia osobno

[POWRÓT DO LISTY](#)

Nożyki do golarki weterynaryjnej - kaseta 10 sztuk



- Część eksploatacyjna do golarki weterynaryjnej
- 10 szt. w kasecie
- Wysoka trwałość ostrzy

[POWRÓT DO LISTY](#)

Igła ASKO



Igła ASKO w swej formie przypomina igłę Gerlacha, różni ją jednak długość i podział na dwie części - igłę i rękojeść. Przy operacyjnej fiksacji trawieńca doskonale nadaje się do przeprowadzenia szwu przez powłoki brzuszne. Długość igły połączonej z rękojeścią wynosi 11,5 cm, co pozwala na jej ukrycie w dłoni w trakcie wprowadzania do miejsca wyklucia w jamie brzusznej. Po przekłuciu powłok brzusznych igłę z nicią można wyciągnąć na zewnątrz, podczas gdy jej rękojeść pozostaje w dłoni operującego.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Igła Gerlacha



Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, idealna do przeprowadzania operacji chirurgicznych. Odporność na stępanie pozwoli na długoletnie i skuteczne użytkowanie.

Wymiary: długość do rękojeści 85 mm, długość całkowita 150 mm.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Igła Bühnera 30 cm do taśmy pochwowej



Igła Bühnera, wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, używana jest do wielu zabiegów chirurgicznych na drogach rodnych bydła. Pozwala m.in. na założenie szwu zacieśniającego szparę sromową po repozycji wypadniętej pochwy lub macicy u krowy. Jeżeli szew wokół warg sromowych zakładany jest przed porodem, należy pozostawić długie końce taśmy pochwowej. Bezpośrednio przed porodem należy rozwiązać węzeł założony na taśmie, dokładnie umyć i zdezynfekować końce pozostające poza szwem i rozszerzając szparę sromową wciągnąć taśmę w głąb warg sromowych, aby nie ograniczała rozwarcia kanału rodniego podczas porodu. Po zakończonym porodzie ponownie zaciąga i zawiązuje się końce taśmy, aby uniemożliwić wypadnięcie pochwy lub macicy. Szew usuwa się po ustąpieniu zagrożenia.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Taśma pochwowa




Taśma używana głównie do zakładania szwu zacieśniającego szparę sromową po repozycji wypadniętej pochwy lub macicy u krowy, owcy, lochy.

Dostępne są dwa rodzaje taśmy pochwowej:

- Taśma pochwowa 4 mm x 5 m - dla owiec
- Taśma pochwowa 6 mm x 5 m - dla krów

[POWRÓT DO LISTY](#)

Igła metalowa wielokrotnego użytku

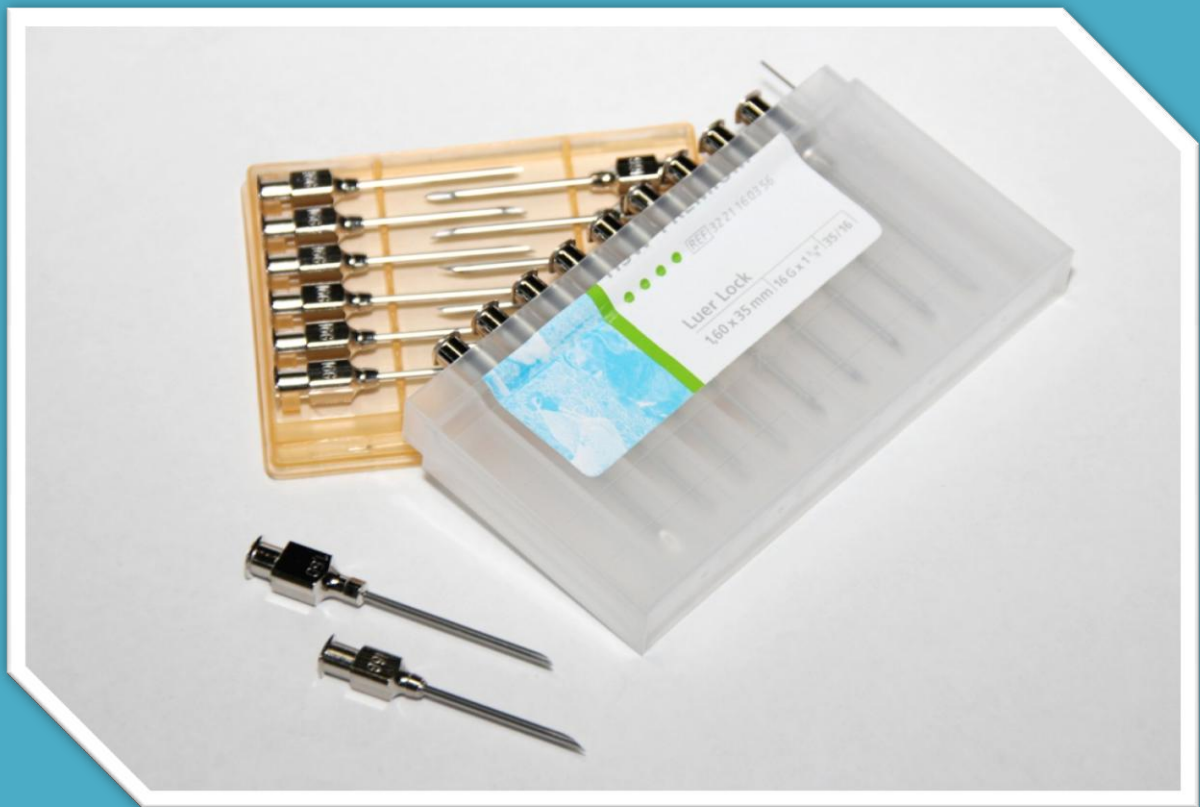

Wysokiej jakości igły metalowe (chromowo węglowa stal nierdzewna) wielokrotnego użytku, z konusem typu Luer. Dostępne wielkości:

- Igła metalowa wielokrotnego użytku - 1,4x25 17G
- Igła metalowa wielokrotnego użytku - 1,6x30 16G

[POWRÓT DO LISTY](#)

Igły jednorazowego użytku (różne wielkości)



Igły jednorazowego użytku - różne wielkości - przykładowe zastosowania (wymiały w mm)

0,5-0,8 x 16

- do tuberkulinizacji strzykawką zaopatrzoną w nasadkę Sterimatic

1,2 x 40; 1,6 x 25

- najbardziej uniwersalne do użytku weterynaryjnego (iniekcje),
- do pobierania krwi u dorosłego bydła z żyły ogonowej, u cieląt i owiec z żyły jarzmowej.

1,8 x 60; 2,0 x 60 SUPRA

- do infuzji dożylnych u koni i bydła

1,2 x 100 SUPRA

- do znieczuleń międzyracicowych u bydła

1,5 x 100 SUPRA

- do znieczuleń nasiękowych u bydła

2,0 x 100; 2,0 x 120 SUPRA

- do punkcji żwacza u bydła

0,8-0,9 x 25

- do pobierania krwi u prosiąt od pierwszego dnia życia do 10 kg m.c.

0,9-1,2 x 40

- do pobierania krwi u warchlaków lub prosiąt (10-40 kg m.c.)

1,2 x 60 SUPRA

- do pobierania krwi u knurków, loszek lub tuczników (35-90 kg m.c.)

1,2 x 75 SUPRA


- do pobierania krwi u knurków, loszek lub tuczników (90-150 kg m.c.)

1,2 x 100 SUPRA (możliwe także SUPRA 1,5 x 100; 2,0 x 100 lub 2,0 x 120)

- do pobierania krwi u każdej wielkości knurów i loch

[POWRÓT DO LISTY](#)

Igły chirurgiczne SERAG-WIESSNER

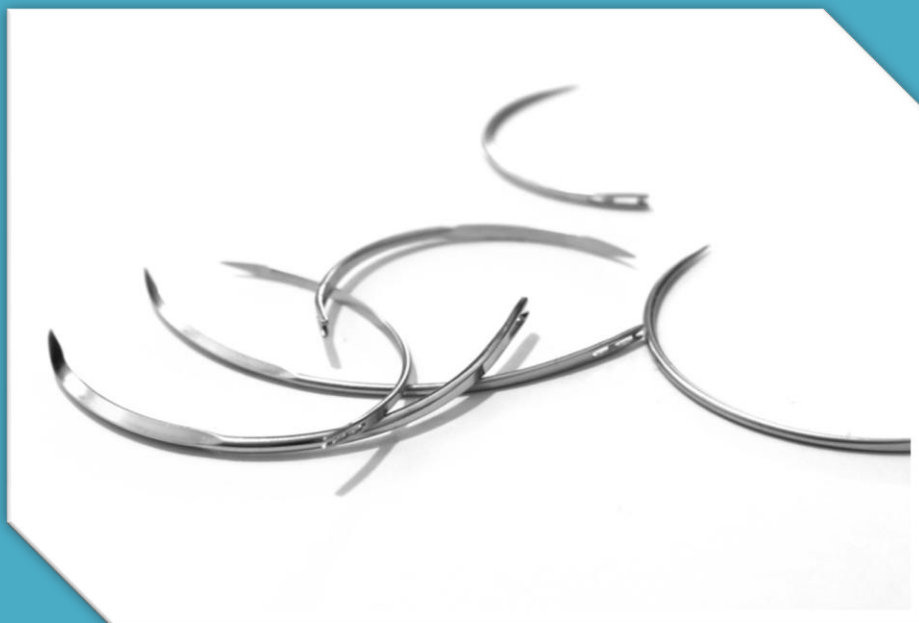

Igły chirurgiczne niemieckiej produkcji SERAG-WIESSNER, są doskonałym narzędziem przy wszelkich operacjach wykonywanych przez lekarzy weterynarii, zarówno tych pracujących przy dużych zwierzętach w terenie, jak i tych w gabinetach weterynaryjnych dla małych zwierząt. Dostępne w różnych wielkościach i typach (tnące, obłe, trokarowe).

Kliknij w poniższe zdjęcie by pobrać Katalog igieł chirurgicznych z Internetu:



[POWRÓT DO LISTY](#)

Nić chirurgiczna SUPRAMID



Niewchłaniaalne, syntetyczne i jałowe nici chirurgiczne SERAG-WIESSNER charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami wiążącymi, dużą trwałością węzła oraz wytrzymałością na rozciąganie.

Cechy i korzyści:

- wyjątkowo poręczny materiał dzięki połączeniu struktury monofilamentowej i plecionych włókien
- gładka powierzchnia umożliwia łatwe przejście przez tkanki
- łatwe do usunięcia
- minimalna reakcja tkankowa
- zapewnia mocne zblizenie tkanek

Wskazania:

- służy do zespалania większości tkanek miękkich, gdzie wymagane jest mocne ich zblizenie
- szycie skóry (szew śródskórny, tkanka podskórna)

Dostępne warianty:

- Nić chirurgiczna SUPRAMID EP 4 (USP 1) - 50 m
- Nić chirurgiczna SUPRAMID EP 6 (USP 3+4) - 50 m

[POWRÓT DO LISTY](#)

Nić chirurgiczna wchłanialna SERASYNTH EP 5 – 15 m



SERASYNTH® - syntetyczny, chirurgiczny materiał szewny do długookresowego zamykania ran

- nici do wszechstronnego stosowania w chirurgii weterynaryjnej

SERASYNTH® to idealny materiał do łączenia i zamykania tkanek miękkich, zapewniający długotrwałe podtrzymywanie tkankowe (do 6 tygodni). Nie wywołuje praktycznie żadnego odczynu tkankowego i zmniejsza ryzyko powikłań. Właściwości materiału zapewniają bezpieczeństwo węzła.

Materiał: poli-p-dioksanon [C₄H₆O₃]_n (PDO), materiał syntetyczny - nie wywołuje praktycznie żadnego odczynu tkankowego, wysoka zgodność tkankowa

Struktura: monofilament niepowlekany o gładkiej powierzchni, atraumatyczny dla tkanek

Kolor: fioletowy (barwiony - D&C Violet nr 2)

Rozkład: hydroliza

Wytrzymałość:

- 70-80% po 14 dniach od zaimplantowania
- 50-70% po 28 dniach od zaimplantowania
- całkowita absorpcja masy szwu około 180-210 dni

Cechy i korzyści:

- wysoka odporność na rozciąganie
- łatwy w stosowaniu, umożliwia wiązanie ścisłego, trwałego węzła
- gładka powierzchnia materiału szewnego ułatwia szycie i eliminuje efekt cięcia tkanek
- giętkość i poręczność daje wysoki komfort pracy

Wskazania:

- chirurgia ogólna
- chirurgia żołądkowo-jelitowa
- ginekologia/położnictwo
- chirurgia urazowa i ortopedia
- zabiegi urologiczne
- szycie skóry (tkanka podskórna, szew śródskórny)
- podwiązki


Opakowanie: kasetka w sterylnym opakowaniu zawierająca 15 m nici SERASYNTH® EP 5

Przechowywać w czystym i suchym pomieszczeniu przy maksymalnie 25 °C.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

POWRÓT DO LISTY

Kaniule strzykowe do opróżniania ćwiartki wymienia u krowy - kpl. 10 szt.

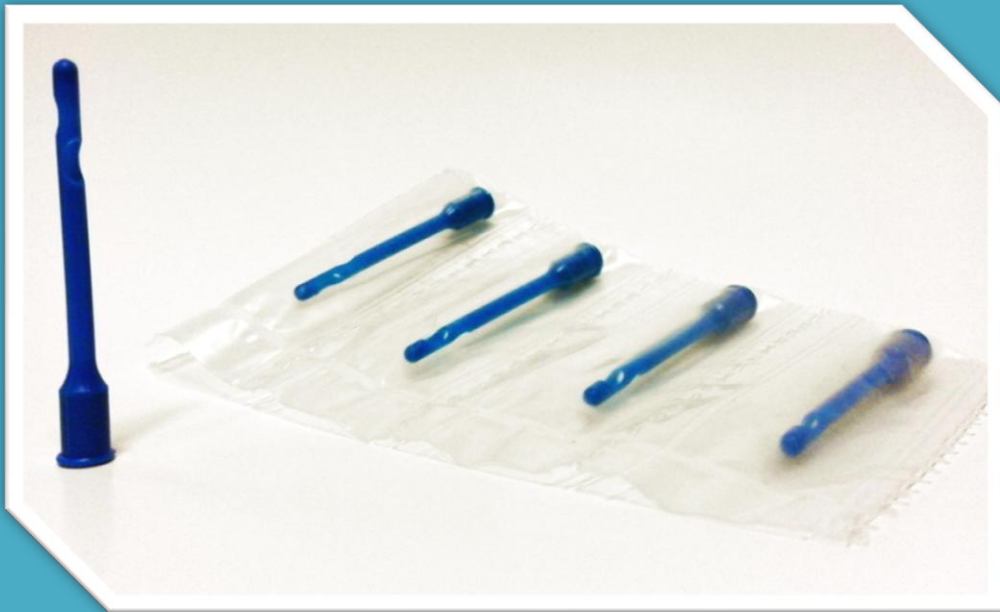

Elastyczna, plastikowa, niebieska kaniula do wprowadzania do kanału strzykowego wymienia krowy. Służy do zdajania mleka przy uszkodzeniach kanału strzykowego lub potrzebie szybkiego zdojenia mleka przy zwężeniach kanału strzykowego. Delikatna, o dużym przepływie.

Wskazania do stosowania:

- opróżnianie ćwiartki wymienia przy niedrożności lub zwężeniu kanału strzykowego
- potrzeba szybkiego zdojenia mleka
- potrzeba stałego spływu wydzieliny ćwiartkowej
- płukanie chorej ćwiartki wymienia
- doćwiartkowe podanie leku (konus Luer)

Stosowanie:

po umyciu i zdezynfekowaniu wierzchołka strzyku wprowadzamy delikatnie kaniulę do kanału strzykowego. Podczas zdajania należy przytrzymywać kaniulę, aby nie doszło do jej wysunięcia się z kanału strzykowego. Gdy istnieje potrzeba stałego spływu wydzieliny ćwiartkowej, wówczas po zdojeniu ćwiartki kaniulę pozostawia się, utrzymując kanał strzykowy w stanie otwartym. Jeżeli wydzielina ma charakter zakaźny, należy brać pod uwagę kontaminację środowiska i niebezpieczeństwo zakażeń krów w sąsiedztwie.

Wymiary:

Ø 3 mm, długość dostrzykowa 40 mm, długość całkowita 51 mm. Zaopatrzona w części dostrzykowej w dwa owalne otwory 6x3 mm; w części zewnętrznej w konus typu Luer.

Opakowanie:

10 kaniul sterylnych, opakowanych indywidualnie w blistrze foliowym.

Uwaga!

Kaniula nadaje się do **jednorazowego** zastosowania.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Kleszcze maciczne Hauptner




Kleszcze lekko wygięte, zaopatrzone są w gumowe łapki, zapewniają stabilną i atraumatyczną fiksację macicy, trawieńca czy żwacza podczas wykonywania operacji na tych organach. Szczególnie przydatne, gdy osobą asystującą podczas wykonywania operacji jest tylko właściciel zwierzęcia.

Gumowe łapki po zużyciu można wymienić na nowe.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Łapki gumowe do kleszczy macicznych Hauptner - kpl. (para)

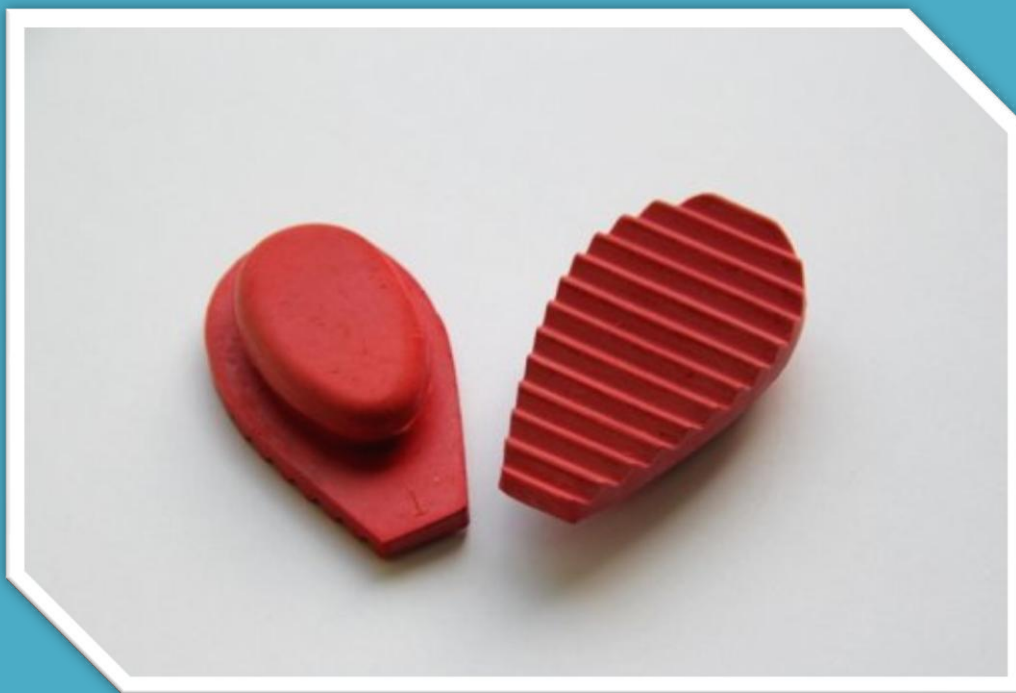

Wraz z upływem czasu i pod wpływem wielokrotnej sterylizacji guma łapek zamocowanych na kleszczach może tracić elastyczność i twardnieć, tracąc tym samym możliwość atraumatycznego chwytania tkanek miękkich. Aby uniknąć uszkodzenia narządów chwytyanych kleszczami, należy sprawdzać elastyczność gumowych łapek i je wymieniać, jak tylko zaistnieje taka konieczność.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Kolczykownica



Wysokiej jakości kolczykownica z wymienną igłą. Sposób wykonania i jakość materiału gwarantuje długotrwałe użytkowanie.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Igła do kolczykownicy



Część eksploatacyjna do kolczykownicy (w znacznym powiększeniu).

[POWRÓT DO LISTY](#)

Kolczyk trapezowy dla loch - kpl. ♀+♂



Kolczyki dla loch, dostępne w dwóch wariantach:

- Kolczyk trapezowy dla loch z nadrukiem - kpl. ♀+♂
- Kolczyk trapezowy dla loch bez nadruku - kpl. ♀+♂ (do oznakowania może służyć permanentny, czarny marker do opisywania kolczyków).

[POWRÓT DO LISTY](#)

Marker do kolczyków, czarny



Permanenty, czarny marker do opisywania kolczyków.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Laat VS Oprawa strzykawki "Laatlong"



Automatycznie napełniająca się strzykawka LaatLong to:


- idealna ergonomia pracy
- łatwa w użytkowaniu
- znacznie ułatwia pracę lekarza weterynarii
- bardzo lekka
- łatwa do dezynfekcji
- wymienne sterylne wkłady
- zmienne dawkowanie
- stabilny uchwyt na flakon

Strzykawka składa się z oprawy i wymiennego sterylnego wkładu.

Uwaga: sterylny wkład jest oddzielną częścią strzykawki.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Laat VS wkład sterylny do strzykawki "Laatlong"

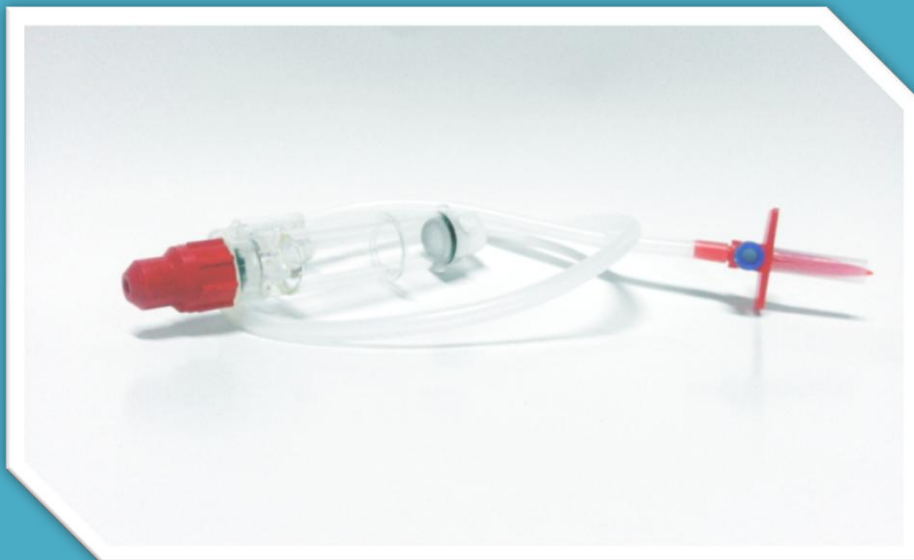

Element eksploatacyjny (wymienny wkład) do strzykawki LaatLong

[POWRÓT DO LISTY](#)

Laat VS Znacznik "Long marker" 80 cm



Znacznik "Long Marker" to idealne narzędzie, pomocne przy wykonywaniu dużej ilości szczepień. Wraz ze strzykawką "LaatLong" umożliwia szybkie szczepienie i znakowanie zaszczepionych zwierząt w dużych grupach przez tylko jedną osobę.

Znacznik Long Marker to:

- idealna ergonomia pracy
- łatwy w użytkowaniu
- znacznie ułatwia pracę lekarza weterynarii
- bardzo lekki
- szczepienie i znakowanie może być przeprowadzane przez jedną osobę
- wymienne puszkki ze sprayem do znakowania
- automatyczne znakowanie po dotknięciu zwierzęcia

Ramię o długości 80 cm+ mocowanie do puszkki ze sprayem do znakowania zwierząt

[POWRÓT DO LISTY](#)

Laat VS Spray do znacznika "Long marker"




Właściwości sprayu do znacznika "Long Marker":

- Szybko schnący spray do znacznika
- Odporny na działanie wilgoci i temperatury
- Zaznaczenie utrzymuje się przez 2-3 dni
- Jedna puszka wystarcza na ok. 800 znakowań
- Dostępność w kolorze czerwonym i niebieskim

[POWRÓT DO LISTY](#)

Laat VS Oprawa strzykawki "Laat visco blue" i "Laat visco red"

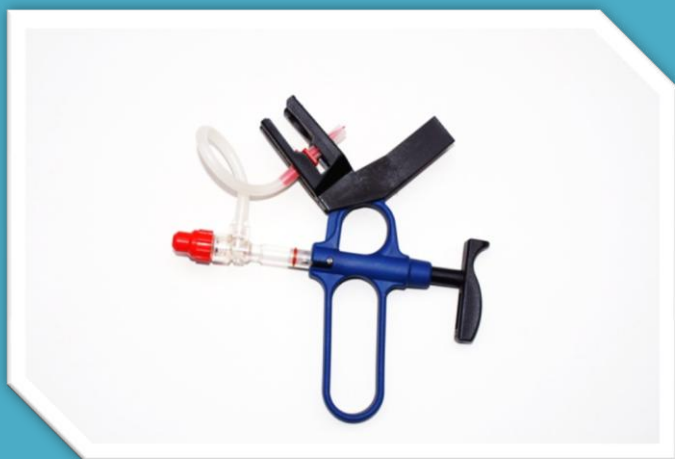

Strzykawki Laat visco blue i Laatvisco red, charakteryzują się bardzo dobrą ergonomią. Ich lekka budowa sprawia, że wykonywanie bardzo dużych ilości iniekcji nie jest zbyt uciążliwe dla dłoni.


Dostępne są dwa warianty opraw:

- Laat VS Oprawa strzykawki "Laat visco blue" 1 ml
- Laat VS Oprawa strzykawki "Laat visco red" 2 ml

Uwaga: sterylny wkład jest oddzielną częścią strzykawki.

[POWRÓT DO LISTY](#)


Laat VS Wkład sterylny do strzykawki "Laatvisco"

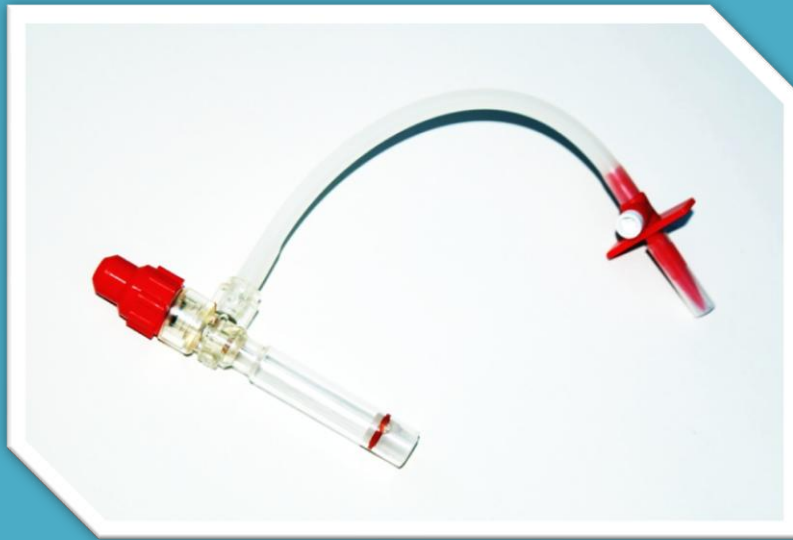

- Element eksploatacyjny do strzykawek „Laatvisco”
- Końcówka do igieł typu Luer-Lock

[POWRÓT DO LISTY](#)


Laat VS Wkład sterylny "SOCO-TOP"

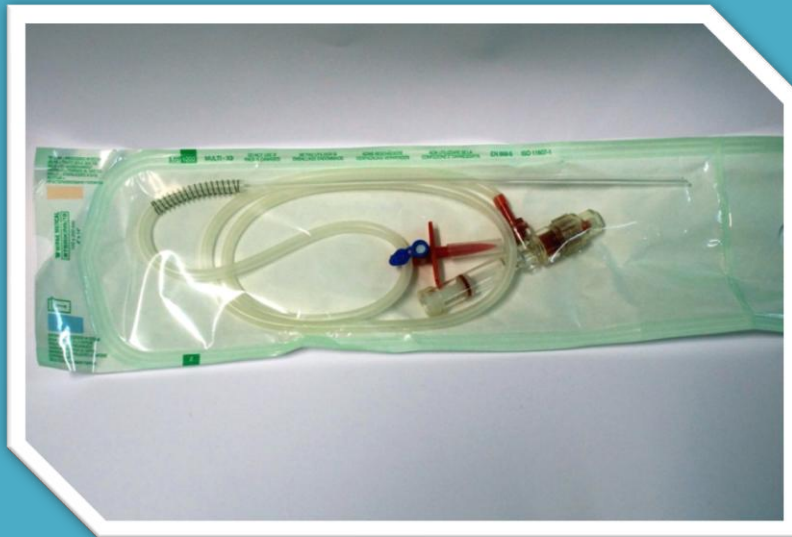

- Wkład sterylny do strzykawk Socorex

[POWRÓT DO LISTY](#)

Lanca elastyczna do szczepień 90 cm

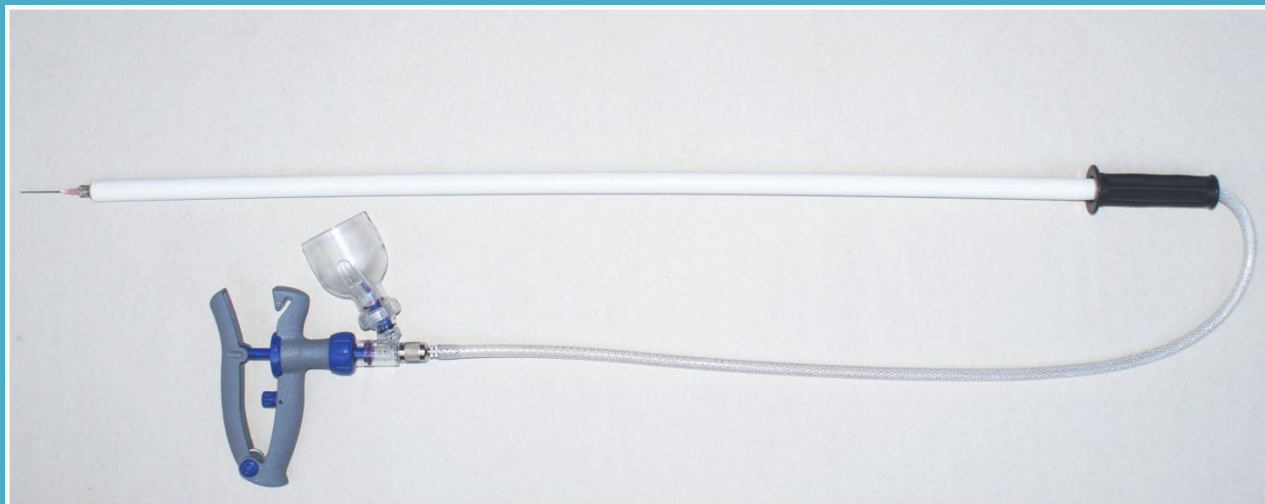

Lanca elastyczna do szczepień, charakteryzuje się prostą budową i mocną konstrukcją.

Zalecana do:

- obsługi dużych stad
- masowych szczepień w dużych grupach zwierząt
- podawania leków, aby móc utrzymać bezpieczną odległość, a tym samym uchronić się przed ewentualnym atakiem zwierzęcia w chwili iniekcji

Lanca zakończona jest konusami typu Luer i Luer-Lock pozwalającymi na szybkie połączenie ze strzykawką i szybką wymianę igły.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Linka porodowa nylonowa z uchwytem - 2 szt.



Linka wykonana z trwałego nylonu, pleciona z plastikowymi, ergonomicznymi uchwytami do manualnej pomocy porodowej.

Wymiary linki: długość 150 cm, średnica 6 mm

[POWRÓT DO LISTY](#)

Mankiet repozycyjny dla loch 35x65 cm



Zdecydowanie ułatwia i zapewnia bardzo dużą skuteczność podczas przeprowadzania zabiegu repozycji wypadniętej macicy u lochy.

Mankiet repozycyjny dla loch o wymiarach 35x65 cm jest:

- praktyczny
- higieniczny
- łatwy w użyciu

Wykonany z bardzo wytrzymałej lecz lekkiej, gumowanej tkaniny.

Sposób wykonania zabiegu opisany jest na stronie internetowej:

(kliknij w zdjęcie)



[POWRÓT DO LISTY](#)

Pętla ryjowa typu Schöttle - 60 cm



Pętla służy do chwytania i poskramiania świń w celu wykonania zabiegów, np. pobierania krwi. Rurka stalowa o długości 60 cm i pętla o średnicy 22 cm z linki stalowej pozwala na swobodne i bezpieczne chwytanie zwierzęcia. Wykonanie z wysokiej jakości materiałów zapewnia stabilność i długotrwałe użytkowanie. Stalowa linka w wyniku użytkowania może się odkształcać w swej formie, a nawet skręcać, dlatego od czasu do czasu należy przywrócić jej wyjściowy kształt przez odpowiednie wyginanie w palcach, tak aby uzyskać regularną pętlę i by jej przesuwanie w rurce nie było utrudnione. W miejscu wyjścia zamocowanego końca linki z głowicy rurki, po kilkusetkrotnym używaniu, łamią się druciki linki. Jeżeli utrudnia to pracę lub grozi zerwaniem linki, należy wówczas wykręcić imbusową śrubę mocującą, wyciągnąć linkę z zamocowania i odciąć ok. 2 cm w miejscu pęknięcia drucików. Po odcięciu druciki linki możliwie ściśle skręcić, by móc ją ponownie wprowadzić do otworu mocującego na głębokość ok. 2 cm i zabezpieczyć śrubą imbusową. Po kilkukrotnej takiej naprawie i nadmiernym zmniejszeniu się średnicy pętli, można dokupić wymienną linkę z uchwytem.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Linka z uchwytem do pętli ryjowej typu Schöttle



Linka w pętli ryjowej typu Schöttle- 60 cm w razie zużycia może być wymieniona na nową. Druciki linki, w miejscu wyjścia jej zamocowanego końca z głowicy, mogą się łamać po kilkusetkrotnym używaniu. Jeżeli utrudnia to pracę, grozi zerwaniem linki lub nie nadaje się do dalszego użytku, linkę należy wymienić na nową. W tym celu należy wykręcić śrubę imbusową mocującą linkę w głowicy, wyciągnąć starą linkę z zamocowania, wprowadzić nową i umocować, przykręcając z odpowiednią siłą śrubę imbusową.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Pętla ryjowa do poskramiania świń typu Trops



Pętla ryjowa do poskramiania świń typu Trops: krótka, bez rurki, Ø 22 cm

Krótką pętlę do poskramiania świń, bez sztywnej rurki, jest preferowana do chwytania świń, do których można blisko podejść. Składa się z linki tworzącej pętlę, z jednej strony zakończonej uchwytem, a z drugiej kółkiem, umożliwiającym zwolnienie zaciśniętej pętli.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Pojemnik do moczu 100 ml



Plastikowy pojemnik na mocz z pokrywką, pojemność 100 ml.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Pompa do pobierania płynu żwaczowego i wlewów dożwaczowych



Pompa o działaniu ssąco-tłoczącym może być używana zarówno do wlewów dożwaczowych jak i pobierania płynu żwaczowego. Otworem bliżej rękojeści tłoka płyn wypływa i tu należy podłączyć sondę do wlewów, natomiast otworem u dołu pompy płyn jest zasysany. Podczas wlewów dożwaczowych pompę z otworem zasysającym wstawiamy do pojemnika z płynem, natomiast do pobierania płynu ze żwacza, sondę do pobierania płynu mocujemy w otworze zasysającym u dołu pompy.

Za jednym razem pompa przepompowuje ok. 0,5 litra płynu.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Pompa - cz. zamienna - dolny konus pompy z zaworem wpustowym



Część zamienna do pompy do wlewów dożwaczowych.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Pompa - cz. zamienna - nakrętka dolna



Część zamienna do pompy do wlewów dożwaczowych.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Pompa - cz. zamienna - nakrętka górna



Część zamienna do pompy do wlewów dożwaczowych.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Pompa - cz. zamienna - rękojeść tłoka



Część zamienna do pompy do wlewów dożwaczowych.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Pompa - cz. zamienna - śruba mocująca tłok



Część zamienna do pompy do wlewów dożwaczowych.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Pompa - cz. zamienna – tłoczek



Część zamienna do pompy do wlewów dożwaczowych.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Pompa - cz. zamienna - trójnik z uszczelką



Część zamienna do pompy do wlewów dożwaczowych.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Pompa - cz. zamienna - uszczelka duża (biała)



Część zamienna do pompy do wlewów dożwaczowych.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Pompa - cz. zamienna - uszczelka mała (czarna)



Część zamienna do pompy do wlewów dożwaczowych.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Probówki neutralne, sterylne N 95 n - 12 ml



Probówek tych można używać do pobierania prób krwi, mleka, moczu i innych płynów do badań laboratoryjnych. Badanie bakteriologiczne powinno być wykonane w jak najkrótszym czasie po pobraniu próby, aby zapobiec namnażaniu się drobnoustrojów w probówce.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Probówki do mleka - bakteriologia - ze śr. bakteriostatycznym - 12 ml



Probówki te zawierają płynny środek stabilizujący, spowalniający namnażanie się drobnoustrojów w czasie między pobraniem a badaniem próby mleka (do 24 godz. w temp. 5-20°C). Ilość środka stabilizującego wyliczona jest na pobranie ok. 10 ml mleka ($\pm 0,5$ ml). Próbkę po pobraniu należy wymieszać. Zawarty barwnik pozwala na rozpoznanie próbki ze środkiem stabilizującym. Probówki z substancją stabilizującą pozwalają na pobieranie prób mleka do badań bakteriologicznych i na zawartość substancji hamujących.

[POWRÓT DO LISTY](#)



Probówki te zawierają azotek sodu (NaN₃) jako środek konserwujący, zapobiegający pojawianiu się zmian w czasie między pobraniem a badaniem próby mleka (do 24 godz. w temp. do 10°C). Ilość środka konserwującego wyliczona jest na pobranie ok. 10 ml mleka ($\pm 0,5$ ml). Próbkę po pobraniu należy wymieszać. Zawarty barwnik pozwala na rozpoznanie próbki ze środkiem konserwującym. Probówki można używać do pobierania prób mleka do badań w celu określenia ilości drobnoustrojów, komórek somatycznych, białka, tłuszczu i in. oraz badań na obecność przeciwciał (bruceloza, białaczka i in.).

[POWRÓT DO LISTY](#)



Służy do pobrania krwi oraz do jej wysyłki i dalszej obróbki w laboratorium. Jest ona tak skonstruowana, że po pobraniu krwi wystarczy tylko odłamać prowadnicę tłoczka, zamknąć konus nasadką i próbka jest gotowa do wysyłki. Konus typu Luer pozwala na pobieranie krwi igłami jednorazowego użytku dowolnych rozmiarów. Podciśnienie wytwarza się poprzez pociąganie tłoczka. Jest to zasadnicza zaleta w porównaniu z gotowymi probówkami podciśnieniowymi. W przypadku zaciągnięcia powietrza tłoczek można przesunąć do pozycji wyjściowej i ponowić próbę. Pojemność i wymiary probówkostrzykawek: pojemność 7,5 ml; średnica 15,0; długość 92 mm. Probówkostrzykawka zawiera EDTA i służy do pobierania i badania pełnej krwi w kierunku np. chor. niebieskiego języka(PCR), badań hematologicznych i. in. Górna krawędź probówki zaopatrzona jest w mechanizm zygzakowo-zaczepowy pozwalający na łatwe i szybkie zdjęcie zakrętki z konusem i uzyskanie probówki gotowej do dalszej obróbki w laboratorium.

Probówkostrzykawki zapewniają łatwość i niezawodność w:

- doborze igły,
- pobieraniu krwi,
- transporcie próbek,
- oznakowaniu próbek,
- obróbce w laboratorium.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Probówkostrzykawka - Heparyna litowa - P 790 - 4,9 ml do pozyskiwania osocza



Działanie przeciwzakrzepowe heparyn polega na hamowaniu trombiny w różnych procesach hemostazy. Po odwirowaniu krwi pełnej i oddzieleniu elementów komórkowych uzyskuje się osocze, wykorzystywane do badań biochemicznych, hormonalnych i markerów nowotworowych.

Probówkostrzykawki zapewniają łatwość i niezawodność w:

- doborze igły,
- pobieraniu krwi,
- transporcie próbek,
- oznakowaniu próbek,
- obróbce w laboratorium.

[POWRÓT DO LISTY](#)



Probówkostrzykawka do pozyskiwania surowicy - 4,9 i 7,5 ml

Służy do pobrania krwi oraz do jej wysyłki i dalszej obróbki w laboratorium. Jest ona tak skonstruowana, że po pobraniu krwi wystarczy tylko odłamać prowadnicę tłoczka, zamknąć konus nasadką i próbka jest gotowa do wysyłki. Konus typu Luer pozwala na pobieranie krwi igłami jednorazowego użytku dowolnych rozmiarów. Podciśnienie wytwarza się poprzez pociąganie tłoczka. Jest to zasadnicza zaleta w porównaniu z gotowymi probówkami podciśnieniowymi. W przypadku zaciągnięcia powietrza tłoczki można przesunąć do pozycji wyjściowej i ponowić próbę. Pojemność i wymiary probówkostrzykawek:

pojemność 4,9 ml średnica 12,5 długość 92 mm

pojemność 7,5 ml średnica 15,0 długość 92 mm

Probówkostrzykawka do pozyskiwania surowicy zawiera środek przyspieszający wykrzepianie oraz plastikowe perełki, które układają się pomiędzy surowicą a skrzepem, co pozwala na łatwiejsze pobranie z niej surowicy. Górna krawędź próbki zaopatrzona jest w mechanizm zygzakowo-zaczepowy pozwalający na łatwe i szybkie zdjęcie zakrętki z konusem i uzyskanie próbki gotowej do obróbki w laboratorium. Dla ułatwienia oznakowania próby, probówkostrzykawki, niezależnie od wielkości, mogą być zaopatrzone w następujące etykiety:

- papierowe bez kodu kreskowego - pozwalają na opis próby,
- foliowe dwuczęściowe, z podwójnym kodem kreskowym - pozwalają na elektroniczny odczyt próby i jej przyporządkowanie do pozycji na liście identyfikacyjnej. Jedna część etykiety z kodem kreskowym pozostaje na probówkostrzykawce a drugą, z tym samym kodem, po oderwaniu, nakleja się na listę identyfikacyjną zwierząt, od których pobrano krew. Probówkostrzykawki zapewniają łatwość i niezawodność w:
- doborze igły,
- pobieraniu krwi,
- transporcie próbek,
- oznakowaniu próbek,
- obróbce w laboratorium.

Kartoniki na 50 szt. probówek/probówkostrzykawek wys. 120 mm i 140 mm



Kartoniki z przegródkami na probówki lub probówkostrzykawki (na 50 szt.)

Kartoniki z przegródkami na 50 sztuk probówek lub probówkostrzykawek o średnicy do ok. 20 mm ułatwiają uporządkowane pobieranie, przesyłanie i obróbkę prób w laboratorium. Tekturowe kartoniki z tekturowymi przegródkami są stabilne, proste w użyciu, przyjazne dla środowiska i łatwe do utylizacji. W sprzedaży pudełka i przegródki są złożone. Przed użyciem łatwo się je składa i wkłada do nich gotowe przegródki. Do kartoników wyższych pasują puste probówkostrzykawki z prowadnicą tłoczka, natomiast do wyższych i niższych pasują probówkostrzykawki po pobraniu krwi i odłamaniu prowadnicy tłoczka.

Wymiary:

- wysokość: 120 mm lub 140 mm,
- szerokość: 210 mm,
- głębokość: 107 mm.

[POWRÓT DO LISTY](#)



SEPTOR® to elastyczna płyta do przegania, sortowania i odgradzania świń w różnym wieku. Pomysł użycia do tego celu elastycznej płyty narodził się w chlewni i sprawdził się podczas pracy w trakcie wieloletniej praktyki. Obecnie zarówno system przegania, sortowania i odgradzania zwierząt przy użyciu elastycznej płyty, jak i sam przyrząd jest opatentowany i podobnie jak nazwa „septor” podlega ochronie patentowej. Płyty SEPTOR® można używać w chlewni lub podczas transportu zwierząt. Praca przy użyciu płyt SEPTOR® jest wolna od stresu i zgodna z wymogami dobrostanu zwierząt. Płyty SEPTOR® wykonane są z elastycznego, niełamiwego i bardzo odpornego na zużycie tworzywa. Te cechy materiału zapewniają nie tylko ich długotrwałe (wieloletnie) użytkowanie, ale także najwyższy stopień higieny. Płyty są bardzo lekkie, gdyż ich grubość to tylko 3 mm. W handlu dostępne są w następujących rozmiarach (w cm): 67x200; 75x200 i 85x200. Dobór wysokości płyty zależy od wielkości zwierząt i upodobań użytkownika. Otwory na uchwyty są tak usytuowane, by pozwalały na wygodne uchwycenie i posługiwanie się płytą każdemu użytkownikowi. Płyty SEPTOR® można stosować do przegania i krótkotrwałego zastawiania świń na korytarzach chlewni, a w zależności od sektora produkcji także w następujących sytuacjach:

- poródówka (sugerowana wysokość płyty to 67 cm):
 - odgrodzenie kilkudniowych prosiąt w kojcu porodowym dla wykonania zabiegów weterynaryjnych i zoohigienicznych (podanie żelaza lub innego preparatu, szczepienie, kastracja itp.)
 - wypędzanie z kojca całego miotu podczas odsadzania od lochy
- odchowalnia (sugerowana wysokość płyty to 67 lub 75 cm):
 - przegania lub wyganianie warchlaków z kojca
 - zagęszczenie warchlaków w kojcu w celu wykonania np. szczepień lub innych zabiegów
 - sortowanie zwierząt np. ze względu na płeć lub wagę
 - odgradzanie pojedynczych zwierząt
- tuczarnia (sugerowana wysokość płyty to 75 lub 85 cm):
 - wypędzanie z kójców grupowych wszystkich tuczników
 - wysegregowanie do sprzedaży pojedynczych tuczników z pomieszczeń grupowych
 - odgradzanie pojedynczych zwierząt
- stado podstawowe (sugerowana wysokość płyty to 85 cm):
 - wypędzanie pojedynczych loch z kójców grupowych
 - prowadzenie loch lub knurów podczas ich przepędzania z kojca do kojca
 - wprowadzanie loch do kójców porodowych

Film ukazujący istotę pracy z płytą SEPTOR dostępny jest pod poniższym linkiem (kliknij na link):

www.septor.de lub www.septor.pl

Skalpel do cięcia cesarskiego



Konstrukcja skalpela i osadzenie ostrza pozwala na przebicie i jednocześnie ujęcie w szczelinie z ostrzem ściany macicy. Przesuwanie skalpela pozwala na bezpieczne przecięcie ściany macicy.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Sonda do pobierania płynów żwaczowych



Sonda wprowadzana jest przez przełyk do żwacza poprzez prowadnicę zabezpieczającą ją przed zgryzieniem. Główkę sondy stanowi stabilny, odporny na zgryzienie, metalowy koszyczek, który umożliwia przesiąkanie płynu z treści żwacza do światła sondy. Zarazem jest on na tyle duży, że w większości przypadków, w momencie wprowadzania sondy do przełyku widać po lewej stronie szyi przesuwający się pod skórą koszyczek. W chwili wprowadzania sondy do przełyku, szyja i głowa krowy powinny być wyprostowane i utrzymywane w pozycji poziomej. Prowadnicę sondy po wprowadzeniu do pyska mocuje się za pomocą klucza nosowego, a specjalny mechanizm (mocujący sondę w prowadnicy) zabezpiecza przed jej wysuwaniem się ze żwacza i przełyku, co sprawia, że operator może zajmować się pompą i pobieraniem płynu żwaczowego. Po zakończonym zabiegu, a przed wyciągnięciem sondy z prowadnicą z pyska, należy wyciągnąć sondę ze żwacza i przełyku, tak by całkowicie schowała się w prowadnicy, co zabezpieczy wąż sondy przed zgryzieniem.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Sonda do wlewów dożwaczowych bez przewodnicy



Składa się z węża i główki sondy. Często po wykonanym wlewie dożwaczowym, sonda przed wyciągnięciem z pyska nie jest uprzednio wyciągnięta do końca ze żwacza i przełyku i aż do główki schowana w przewodnicy. W takim wypadku najczęściej dochodzi do zgryzienia węża sondy podczas wyciągania z pyska i konieczności wymiany na nową.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Sonda do wlewów dożwaczowych z prowadnicą



Sondę wprowadza się przez przelyk do żwacza poprzez prowadnicę zabezpieczającą ją przed zgryzaniem. Główka sondy jest tak uformowana, aby przy przechodzeniu przez gardło nie doszło do jej przypadkowego wprowadzenia do tchawicy. Pozwala ona także, w większości przypadków, na obserwację przesuwającej się w przelyku sondy, po lewej stronie szyi.

W chwili wprowadzania sondy do przelyku szyja i głowa krowy powinny być wyprostowane i utrzymywane w pozycji poziomej. Prowadnicę sondy, po wprowadzeniu do pyska, mocuje się za pomocą klucza nosowego. Następnie sondę, po wprowadzeniu do żwacza, przypina się do prowadnicy, aby zabezpieczyć przed jej wysuwaniem się ze żwacza i przelyku, co pozwala operatorowi na wpompowywanie przygotowanego roztworu bez konieczności stałego kontrolowania osadzenia sondy. Po zakończonym zabiegu, a przed wyciągnięciem sondy z prowadnicą z pyska, należy wyciągnąć sondę ze żwacza i przelyku, tak by całkowicie schowała się w prowadnicy, co zabezpieczy wąż sondy przed zgryzieniem.

Wlewy dożwaczowe, czyli drenching to:

- wzmocnienie krowy po porodzie,
- zapewnienie prawidłowego przebiegu laktacji,
- redukcja lewostronnego przemieszczenia trawieńca,
- brak reakcji smakowej na wprowadzane preparaty,
- znikome niebezpieczeństwo zalania płuc,
- niski koszt i łatwe wykonanie zabiegu.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Sonda do wlewów dożwaczowych dla cieląt bez osłony



Składa się z węża i główki sondy. Często po wykonanym wlewie dożwaczowym, sonda przed wyciągnięciem z pyska nie jest uprzednio wyciągnięta do końca ze żwacza i przełyku i aż do główki schowana w osłonie. W takim wypadku najczęściej dochodzi do zgryzienia węża sondy podczas wyciągania z pyska i konieczności wymiany na nową.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Sonda do wlewów dożwaczowych dla cieląt z osłoną



Sondę wprowadza się przez przelyk do żwacza poprzez osłonę zabezpieczającą ją przed zgryzaniem. Główka sondy jest tak uformowana, aby przy przechodzeniu przez gardło nie doszło do jej przypadkowego wprowadzenia do tchawicy. Pozwala ona także, w większości przypadków, na obserwację przesuwającej się w przelyku sondy, po lewej stronie szyi.

W chwili wprowadzania sondy do przelyku szyja i głowa cielaka powinny być wyprostowane i utrzymywane w pozycji poziomej. Osłonę sondy, po wprowadzeniu do pyska, mocuje się za pomocą przyłączonej linki za uszami zwierzęcia i można dokonać wpompowania przygotowanego roztworu. Po zakończonym zabiegu, a przed wyciągnięciem sondy z osłoną z pyska, należy wyciągnąć sondę ze żwacza i przelyku, tak by całkowicie schowała się w osłonie, co zabezpieczy wąż sondy przed zgryzieniem.

Do w/w sondy dla cieląt polecamy również pompę do wlewów dożwaczowych i pobierania płynu żwaczowego.



[POWRÓT DO LISTY](#)

Sonda przeciwwzdęciowa dla bydła z osłoną



Dzięki perforacji na znacznym odcinku sondy możliwe jest szybkie i skuteczne odprowadzenie gazów z wzdętego żwacza. Odpowiednio wyprofilowana głowica sondy, wykonana z nierdzewnej, kwasoodpornej stali, pozwala na atraumatyczne wprowadzenie sondy do przełyku i do żwacza. Osłona z bardzo wytrzymałego poliamidu zabezpiecza sondę przed pogryzieniem.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Spinki pochwowe Bovivet 55-75 mm



Przetyczki Flessa. Razem z szynami bocznymi tworzą przyrząd (aparat) Flessa. Alternatywa do taśmy pochwowej. Zalecane przy chirurgicznych zabiegach na drogach rodnych u bydła, np. jako zabezpieczenie przy wypadnięciu pochwy.

[POWRÓT DO LISTY](#)




Paski korekcyjne dla prosiąt z poporodową rozkrocznością kończyn tylnych

Czasami nowo narodzone prosięta borykają się z niedorozwojem mięśni kończyn tylnych (tzw. rozkroczość poporodowa prosiąt). Schorzenie, to jest łatwe do zdiagnozowania, ponieważ prosięta cierpiące na tę chorobę mają szeroko rozstawione tylne kończyny, nie pozwalające na wstawanie i poruszanie się. Sytuacja ta może doprowadzić do wycieńczenia, zagniecenia czy też śmierci z głodu.

Rozwiązaniem na tego typu problemy jest SplaylegSTOP® - gumowa taśma pozwalająca na przywrócenie muskulatury nóg prosięcia. Użycie tego produktu pozwala na ustalenie nóg prosiąt w pozycji stojącej (zbliżonej do naturalnej) i tym samym na poruszanie się i dostęp do pokarmu.

Istotnym jest, by założyć SplaylegSTOP® jak najszybciej po zauważeniu osobnika z tą wadą, dzięki temu zostanie przywrócona muskulatura obręczy kończyn tylnych w ciągu kilku dni i jednocześnie prosię odzyska naturalną pozycję nóg.

Trzy dni po rozpoczęciu stosowania SplaylegSTOP® należy monitorować rozwój zwierzęcia. Szacuje się, że prosię powinno odzyskać naturalną postawę w ciągu tygodnia.

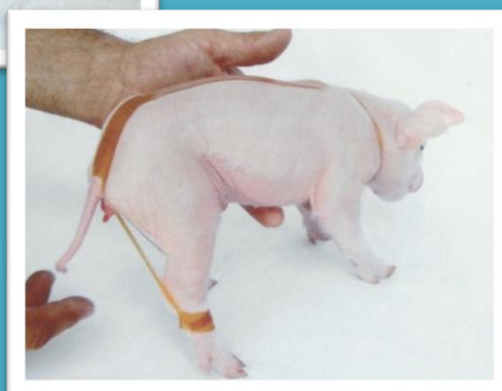

[POWRÓT DO LISTY](#)

Stetoskop weterynaryjny dla dużych zwierząt



Sprawdzony, solidny stetoskop weterynaryjny do osłuchiwania dużych zwierząt. Wyposażony w nierdzewną, stalową głowicę z membraną o średnicy 65 mm i dłuższe niż standardowe, czerwone przewody silikonowe. Waga ok. 300 g.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Oliwka słuchawkowa do stetoskopu dla dużych zwierząt - 1 szt.



Część eksploatacyjna do stetoskopu weterynaryjnego.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Strzykawka samorepetująca Prima TechBMV



Strzykawki Prima Tech dają możliwość ustawienia dowolnej wielkości dawki. Są dopracowane ergonomicznie. Przystawny system nacisku pozwala na odciążenie dłoni podczas masowych szczepień dużej ilości zwierząt. Lek do strzykawki Prima Tech BMV pobierany jest z flakonu osadzonego bezpośrednio na strzykawce. Możliwe jest osadzenie bezpośrednio na strzykawce flakonu o pojemności od 20 do 250 ml. Strzykawki o pojemności 0,5 lub 1 ml stosowane są najczęściej do masowych szczepień drobiu i małych zwierząt, natomiast strzykawki o pojemności 2 lub 5 ml stosowane są głównie do masowych szczepień zwierząt gospodarskich.

Dostępne warianty:

- 0,5 ml
- 1 ml
- 2 ml
- 5 ml

[POWRÓT DO LISTY](#)

Strzykawki samorepetujące Prima Tech Vaccinator



Strzykawki Prima Tech dają możliwość ustawienia dowolnej wielkości dawki. Są dopracowane ergonomicznie. Przystawny system nacisku pozwala na odciążenie dłoni podczas masowych szczepień dużych ilości zwierząt. Lek do strzykawki Prima Tech Vaccinator pobierany jest z flakonu podłączonego wężykiem zasysającym. Możliwe jest podłączenie flakonów o różnych średnicach pierścienia zamykającego. Strzykawki o pojemności 0,5 lub 1 ml stosowane są najczęściej do masowych szczepień drobiu i małych zwierząt, natomiast strzykawki o pojemności 2 lub 5 ml stosowane są głównie do masowych szczepień zwierząt gospodarskich.

- 0,5 ml
- 1,0 ml
- 2,0 ml
- 5,0 ml

[POWRÓT DO LISTY](#)

Sztyfty strzykowe silikonowe - kpl. 10 szt.



Elastyczne, silikonowe sztyfty służą do wprowadzania do kanału strzykowego wymienia krowy. Sztyfty są elastyczne, giętkie, niedrażniące dla tkanek, w kolorze czerwonym.

Wskazania do stosowania:

- leczenie niedrożności lub zwężenia kanału strzykowego,
- zamknięcie kanału strzykowego po dowymieniowym zadaniu leku przy niedomykalności zwieracza strzyku.

Stosowanie:

sztyft po udoju lub po zadaniu dowymieniowym leku wprowadzamy delikatnie do kanału strzykowego i wyjmujemy przed następnym udojem. Przed wprowadzeniem sztyftu należy umyć i zdezynfekować wierzchołek strzyku.

Wymiary:

Ø 3 mm, długość dostrzykowa 23 mm, długość całkowita 28 mm.

Opakowanie:

10 sztyftów sterylnych, opakowanych indywidualnie w blistrze foliowym.

Uwaga!

Sztyfty silikonowe mogą, po wcześniejszym umyciu i sterylizacji, być użyte ponownie.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Sztyfty strzykowe woskowe z nitką - kpl. 24 szt.



1. Umieść woskowy sztyft w kanale strzyku, jak na rysunku.



2. Wystającą końcówkę (nitkę) przytwierdź do ściany strzyku plasterm/taśmą



Woskowy, atraumatyczny, elastyczny i sterylny sztyft do wprowadzania do kanału strzykowego wymienia krowy. Służy do zabezpieczenia kanału strzykowego przed zwężeniem w trakcie czasowego wyłączenia z doju ćwiartki wymienia po urazie. Zabezpiecza ćwiartkę przed infekcją z zewnątrz i przyspiesza regenerację uszkodzonej ściany kanału strzykowego. Nie drażni tkanek, ulega częściowemu rozpuszczeniu.

Wskazania do stosowania:

- czasowe wyłączenie z doju ćwiartki wymienia po urazie,
- urazy w obrębie kanału strzykowego,
- po zabiegu udrażniania zwężonego kanału strzykowego.

Stosowanie:

po zdojeniu ćwiartki wymienia, umyciu i zdezynfekowaniu wierzchołka strzyku otwieramy i rozchylamy opakowanie po stronie czubka sztyftu i najlepiej przez rozchylone opakowanie, aby nie dotykać sztyftu, wprowadzamy go całkowicie do kanału strzykowego. Na zewnątrz wystaje połączona ze sztyftem nitka, którą przy pomocy plastra lub elastycznej taśmy klejącej mocujemy do ściany strzyku, co zabezpiecza sztyft przed wysunięciem na zewnątrz lub wślizgnięciem do zatoki strzykowej. Przy podejrzeniu obecności w ćwiartce wymienia drobnoustrojów mogących wywołać mastitis, należy przed wprowadzeniem sztyftu podać doćwiartkowo odpowiedni antybiotyk, a czynność powtarzać raz dziennie. Jeżeli TOK wypada negatywnie sztyft można zmieniać nawet co trzy dni. Całość kuracji powinna trwać 6 do 9 dni. Preparat antybiotykowy może być wprowadzany do ćwiartki wymienia także profilaktycznie.

Wymiary:

Ø 3 mm, długość sztyftu 35 mm, długość nitki 35 mm. Stożkowaty czubek sztyftu ułatwia jego wprowadzanie przez zwieracz do kanału strzykowego.

Opakowanie:

pudełko zawierające 24 sterylne sztyfty, opakowane pojedynczo w blistrze foliowym.

Okres karencji:

nie obowiązuje.


Uwaga!

Sztyfty nadają się **wyłącznie do jednorazowego** zastosowania.

Sposób zakładania sztyftu pokazany jest na schemacie powyżej.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Tbc Cylinder do strzykawki pistoletowej MUTO do Tbc

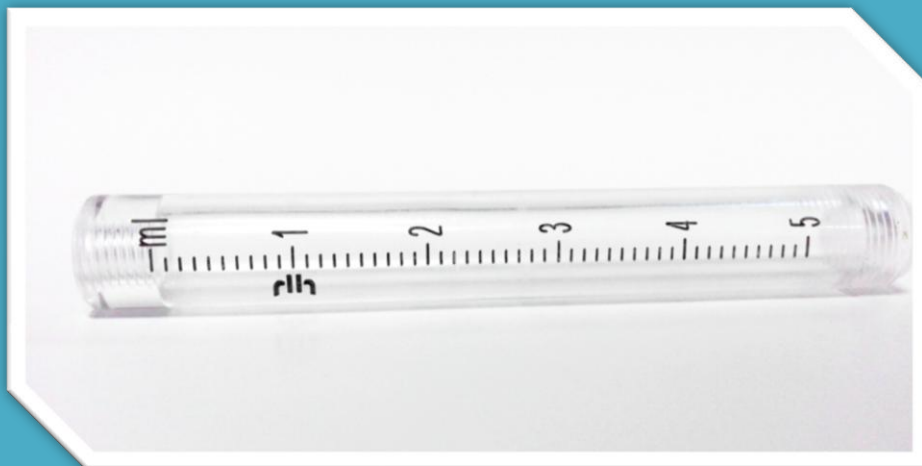

Element eksploatacyjny do strzykawki Tbc MUTO. Cylinder w całości wykonany z tworzywa sztucznego, co po demontażu strzykawki pozwala na jej termiczną sterylizację.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Tbc Głowica dezynfekująca do nasadki Sterimatic do strzykawki MUTO Tbc - kpl. 5 szt.



Głowica dezynfekująca do nasadki Sterimatic

- głowicę dezynfekującą należy mocno osadzić w cylindrze nasadki Sterimatic,
- przed użyciem należy oderwać zatyczkę w celu odpieczętowania i przygotowania głowicy do użycia,
- głowica dezynfekująca zawiera 2,5% aldehyd glutarowy i 5% bardac 22,
- jedna głowica wystarcza na ok. 100 iniekcji, a po napoczęciu zachowuje skuteczność przez 72 godziny.

Opakowanie: blister zawierający 5 głowic.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Tbc Igła Hauptner do strzykawki MUTO Tbc- 0,6x5 mm Luer



Igła do strzykawki MUTOTbc z konusem typu Luer, na stożkowym słupku

- metalowa, osadzona na stożkowym słupku,
- wymiary: 0,6 x 5 mm
- w komplecie z mandrynem,
- wielokrotnego użytku,
- konus typu Luer,
- mocowanie Luer-Lock pozwala na szybką wymianę igły po każdej iniekcji,
- nadaje się do sterylizacji suchej i mokrej.

Opakowanie: pudełko plastikowe zawierające 12 igieł.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Tbc Igła do strzykawki MUTO - Tbc+Sterimatic - 0,7x15 mm Luer



Igła do strzykawki MUTO Tbc z nasadką Sterimatic - 0,7x15 mm Luer

- do śródskórnej iniekcji tuberkuliny przy zastosowaniu nasadki Sterimatic z głowicą dezynfekującą,
- podobna w budowie do metalowej igły iniekcyjnej, wielokrotnego użytku, z nałożonym elastycznym pierścieniem
- mocowanie Luer-Lock pozwala na łatwą zmianę igły,
- nadaje się do sterylizacji suchej i mokrej,
- stosowanie nasadki Sterimatic z głowicą dezynfekującą pozwala na wielokrotne używanie igły, bez konieczności jej zmiany do każdego zwierzęcia.

Opakowanie: pudełko plastikowe zawierające 12 igieł.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Tbc Igła do Tbc - 0,7x4 mm Luer



Igła do strzykawki MUTO Tbc do stosowania bez nasadki Sterimatic - 0,7x 4 mm Luer

- zwykle stosowana przy niewielkiej liczbie zwierząt do tuberkulinizacji,
- mocowanie Luer-Lock pozwala na szybką wymianę igły po każdej iniekcji,
- metalowa - nadaje się do sterylizacji suchej i mokrej.

Opakowanie: pudełko plastikowe zawierające 12 igieł.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Tbc Nasadka Sterimatic do strzykawki MUTO Tbc – komplet



Strzykawka pistoletowej MUTO Tbc zaopatrzona w nasadkę Sterimatic idealnie nadaje się do stosowania do tuberkulinizacji. Osadzona w nasadce Sterimatic głowica dezynfekująca automatycznie, dwukrotnie dezynfekuje igłę po każdej iniekcji, zarówno przy wysuwaniu, jak i cofaniu igły.

Przy użyciu strzykawki pistoletowej MUTO Tbc z nasadką Sterimatic możliwa jest tuberkulinizacja wielu zwierząt tą samą igłą. W ten sposób czas pracy lekarza weterynarii znacznie się skraca, a także zmniejsza się ilość igieł niezbędnych w tradycyjnie wykonywanej tuberkulinizacji.

Nasadka Sterimatic:

- składa się z dwóch sprężynowo połączonych cylindrów i głowicy dezynfekującej,
- pozwala na wstrzykiwanie śródskórne tuberkuliny przy prostopadłym wkluciu igły,
- w chwili przyłożenia i dociśnięcia strzykawki z założoną nasadką Sterimatic do skóry zwierzęcia cylindry nasadki chowają się w sobie, w tym czasie igła iniekcyjna przechodzi przez głowicę dezynfekującą a następnie wkluwa się w skórę na głębokość gwarantującą śródskórne wstrzyknięcie tuberkuliny,
- cofnięcie strzykawki powoduje ponowne wysunięcie ruchomego cylindra nasadki, w tym czasie igła iniekcyjna ponownie przechodzi przez głowicę dezynfekującą i w kilka sekund później jest gotowa do następnej iniekcji.

Do strzykawki MUTO Tbc z nasadką Sterimatic stosuje się igły iniekcyjne, wielokrotnego użytku z nałożonym elastycznym pierścieniem o wymiarach - 0,7x15 mm Luer. Pasują do tego sprzętu także igły jednorazowego użytku o wymiarach 0,5-0,8 x 16 mm.

Opakowanie zawiera pełny komplet do montażu i użycia nasadki Sterimatic.

W komplecie znajdują się: nasadka, gwintowany łącznik (adapter) i 5 głowic dezynfekujących.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Tbc Strzykawka pistoletowa MUTO do Tbc Hauptner



Strzykawka jest bardzo niezawodna i prosta w obsłudze. Zbudowana z lekkiego metalu, a cylinder z odpornego plastiku o pojemności 5 ml. Pozwala na przestawne, stabilne ustawienie dawki 0,1; 0,2; 0,3 lub 0,4 ml. Obecnie stosowanie dawki 0,1 ml pozwala za jednym naciągnięciem tuberkuliny do strzykawki, przeprowadzić tuberkulinizację 50 zwierząt. Umożliwia montaż i pracę z użyciem opisanej powyżej nasadki Sterimatic, służącej do dezynfekcji igły po każdej iniekcji.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Tbc Suwmiarka analogowa do Tbc Hauptner



Suwmiarka analogowa z podziałką kreskową na prowadnicy i noniuszem na suwaku. Skala dolna wyrażona jest w milimetrach a skala górna w calach. Posiada szczęki pomiarowe o dużej powierzchni dociskowej przystosowane do pomiaru skóry. Zamontowana sprężyna dociskowa pozwala na równomierny docisk szczęk podczas pomiaru. Ergonomiczny kształt ułatwia dokonywanie pomiarów. Po przeciwnej stronie skali znajduje się śruba dociskowa pozwalająca na utrzymanie dokonanego pomiaru.

Wymiary: dł. 183 mm; szer. 110 mm; waga 248 g. Szerokość szczęk pomiarowych 15 mm.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Tbc Suwmiarka cyfrowa do Tbc Hauptner



Suwmiarka z cyfrowym wyświetlaczem pomiaru, z możliwością przestawnego odczytu w milimetrach lub w calach. Zaopatrzona w przyciski włącznika/wyłącznika i zerowania wyświetlacza, zasilana baterią LR 44. Szczęki pomiarowe mają dużą powierzchnię dociskową, przystosowaną do pomiaru skóry. Zamontowana sprężyna dociskowa pozwala na równomierny docisk szczęk podczas pomiaru. Ergonomiczny kształt ułatwia wykonywanie pomiarów. Po przeciwnej stronie skali znajduje się śruba dociskowa pozwalająca na utrzymanie dokonanego pomiaru.

Wymiary: dł. 183 mm; szer. 110 mm; waga 247 g. Szerokość szczęk pomiarowych 15 mm.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Tbc Zestaw - Strzyk. MUTO + suwmiarka analogowa + Sterimatic + kuferek



W skład zestawu do tuberkulinizacji w futerale wchodzi:

strzykawka pistoletowa do Tbc o poj. 5 ml,
suwmiarka sprężynowa analogowa,
igła do Tbc (Luer) 0,7x15 mm - 10 szt.,
nasadka Sterimatic + 5 głowic + adapter.

Opis działania sprzętu do tuberkulinizacji z użyciem nasadki Sterimatic

Strzykawka pistoletowa MUTO do Tbc niemieckiej firmy Hauptner jest bardzo niezawodna i prosta w obsłudze. Zbudowana z lekkiego metalu, a cylinder z odpornego plastiku o pojemności 5 ml. Przystawne, stabilne ustawienie dawki 0,1; 0,2; 0,3 i 0,4 ml. Obecnie stosowanie dawki 0,1 ml pozwala za jednym naciągnięciem tuberkuliny do strzykawki przeprowadzić tuberkulinizację 50 zwierząt. Za pomocą specjalnego, gwintowanego łącznika na strzykawkę można nakręcić nasadkę dezynfekującą Sterimatic.

Nasadka Sterimatic zapewnia automatyczną dezynfekcję igły po każdej iniekcji. W chwili przyłożenia i dociśnięcia strzykawki z założoną nasadką Sterimatic do skóry zwierzęcia igła iniekcyjna przechodzi przez głowicę dezynfekującą a następnie wkuwa się w skórę na głębokość gwarantującą śródskórne wstrzyknięcie tuberkuliny. Nasadka Sterimatic wymaga odpowiednio przystosowanych igieł, ale możliwe jest też stosowanie igieł jednorazowego użytku.

Głowica dezynfekująca do Sterimatic zawiera 2,5% aldehyd glutarowy i 5% bardac 22. Jedna głowica wystarcza na ok. 100 iniekcji, a po napoczęciu zachowuje skuteczność przez 72 godziny. Głowicę dezynfekującą należy mocno osadzić w cylindrze nasadki Sterimatic.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Tbc Zestaw - Strzyk. MUTO + suwmiarka cyfrowa + Sterimatic + kuferek



W skład zestawu do tuberkulinizacji w futerale wchodzi:

strzykawka pistoletowa do Tbc o poj. 5 ml,
suwmiarka sprężynowa cyfrowa,
igła do Tbc (Luer) 0,7x15 mm - 10 szt.,
nasadka Sterimatic + 5 głowic + adapter.

Opis działania sprzętu do tuberkulinizacji z użyciem nasadki Sterimatic

Strzykawka pistoletowa MUTO do Tbc niemieckiej firmy Hauptner jest bardzo niezawodna i prosta w obsłudze. Zbudowana z lekkiego metalu, a cylinder z odpornego plastiku o pojemności 5 ml. Przystawne, stabilne ustawienie dawki 0,1; 0,2; 0,3 i 0,4 ml. Obecnie stosowanie dawki 0,1 ml pozwala za jednym naciągnięciem tuberkuliny do strzykawki przeprowadzić tuberkulinizację 50 zwierząt. Za pomocą specjalnego, gwintowanego łącznika na strzykawkę można nakręcić nasadkę dezynfekującą Sterimatic.

Nasadka Sterimatic zapewnia automatyczną dezynfekcję igły po każdej iniekcji. W chwili przyłożenia i dociśnięcia strzykawki z założoną nasadką Sterimatic do skóry zwierzęcia igła iniekcyjna przechodzi przez głowicę dezynfekującą a następnie wkuwa się w skórę na głębokość gwarantującą śródskórne wstrzyknięcie tuberkuliny. Nasadka Sterimatic wymaga odpowiednio przystosowanych igieł, ale możliwe jest też stosowanie igieł jednorazowego użytku.

Głowica dezynfekująca do Sterimatic zawiera 2,5% aldehyd glutarowy i 5% bardac 22. Jedna głowica wystarcza na ok. 100 iniekcji, a po napoczęciu zachowuje skuteczność przez 72 godziny. Głowicę dezynfekującą należy mocno osadzić w cylindrze nasadki Sterimatic.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Trokar śrubowy Buff 135 mm




Trokar śrubowy Buff używany jest głównie u cieląt i młodego bydła, u których dochodzi do chronicznego, nawrotowego wzdęcia, nie dającego się wyleczyć farmakologicznie. Trokar wprowadzony na dłuższy czas zabezpiecza przed wypadnięciem gwintowanej części. Trokar śrubowy Buff jest z plastiku i po ustąpieniu objawów nawrotowego wzdęcia (2-4 tygodni) można go wykręcić lub po prostu odciąć pozostającą na zewnątrz płytkę. Część śrubowa wpada wówczas do żwacza nie powodując żadnych problemów. Czasami ta część zostaje wyrzucona podczas odłykania. Dla łatwiejszego wprowadzenia trokaru można, przed wkluciem w powłoki brzuszne, zrobić w skórze niewielkie cięcie skalpelem. Aby zapewnić zbliżenie ściany żwacza do otrzewnej ściennej i uszczelnić tę okolicę można opaską gazową owinać trokar między skórą a płytką zewnętrzną. Opaskę gazową można nasączyć preparatem przeciwbakteryjnym. Jeżeli trokar przedwcześnie wypada z miejsca wprowadzenia, można go przyszyć do skóry, korzystając z otworów umieszczonych na zewnętrznej płytce.

W komplecie z metalowym mandrynem dla łatwego i szybkiego wprowadzenia.

Wymiary: płytka owalna Ø 65x85 mm, część śrubowa dł. 90 mm, mandryn stalowy dł. 150 mm

[POWRÓT DO LISTY](#)

Wlewnik weterynaryjny

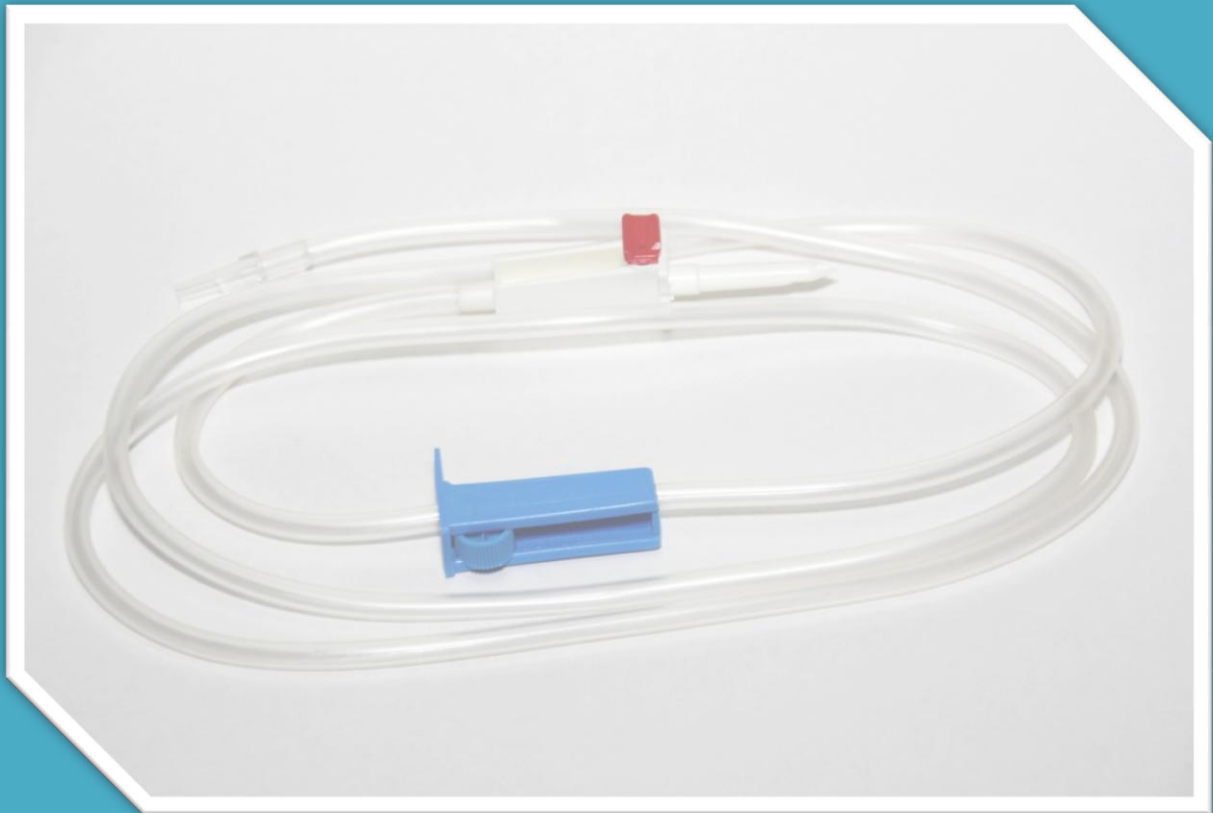

Wlewnik używany jest głównie do infuzji dożylnych u zwierząt gospodarskich i koni. Głowica wlewnika posiada ostrą, dwukanałową igłę biorczą i mikrofiltr pod czerwoną zatyczką, które pozwalają na jałowe pobieranie leku z flakonu. Przewód wlewnika wykonany z elastycznego i przezroczystego tworzywa, bez tzw. przekraplacza spowalniającego wlew, posiada regulator prędkości pozwalający precyzyjnie i bezpiecznie podawać preparat dożylnie. Zakończony jest konusem typu Luer.

Pakowany sterylnie w foliowe blistry, z gwarancją utrzymania jałowości przez 5 lat.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Prolaps - Set


do chirurgicznego leczenia wypadnięcia prostnicy u świń
- szybki i prosty zabieg ratujący życie -




Skład zestawu:

- dwie pary rękawiczek jednorazowego użytku
- gumki elastyczne
- skalpel jednorazowego użytku
- 1 x elastyczna rurka karbowana o długości 12-15 cm i średnicy*:

* warchlaki - Ø 20 mm
* tuczniki - Ø 25 mm
* lochy - Ø 32 mm

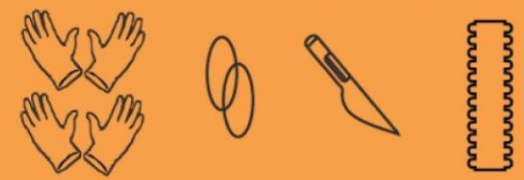

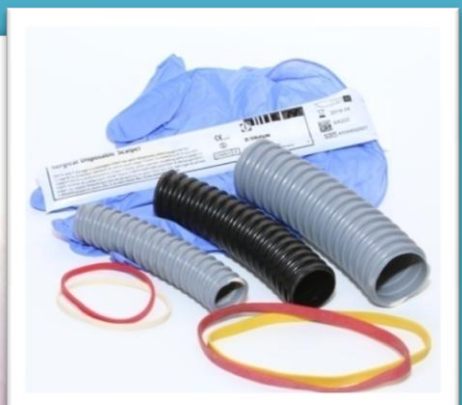

Częstotliwość wypadania odbytu i prostnicy u świń szacowana jest na około 1-2%, choć w krytycznych sytuacjach może dochodzić nawet do kilkunastu procent w grupie. Zaobserwowano, że problem ten najczęściej obserwuje się u świń o wadze od 10 do 90 kg. Dokładny mechanizm powstawania tej przypadłości nie jest do końca poznany. Potencjalnych czynników wpływających na wypadanie odbytu i prostnicy jest wiele, ale główną przyczynę upatruje się w silnym i uporczym kaszlu lub długotrwałej bieguncie, a u loch także w skurczach porodowych. Wypadnięcie odbytu i prostnicy u świń pojawia się nagle, a leczenie wymaga niezwłocznego działania. Użycie do tego celu zestawu Prolaps - Set sprawia, że zabieg, ratujący zwierzęciu życie, jest szybki i prosty do zrobienia, a wykonany przy wczesnym wypadnięciu daje wręcz stu procentową skuteczność.

Skład zestawu:

- dwie pary rękawiczek jednorazowego użytku
- gumki elastyczne
- skalpel jednorazowego użytku
- 1 x elastyczna rurka karbowana o długości 12-15 cm i średnicy*:
 - * warchlaki - Ø 20 mm
 - * tuczniki - Ø 25 mm
 - * lochy - Ø 32 mm

Sposób użycia: Świnie z wypadniętą prostnicą pomocnik ustawia w odpowiedniej pozycji przy pomocy płyty przepędowej lub pętli ryjowej. W gestii lekarza weterynarii pozostaje decyzja o wykonaniu sedacji, znieczulenia miejscowego czy ogólnego u operowanego zwierzęcia, które należy odseparować od grupy. Operujący, rękoma w rękawiczkach, delikatnym okrężnym ruchem wprowadza elastyczną rurkę całkowicie do wypadniętego jelita i dalej do części prostnicy w jamie miednicowej, tak aby połowa rurki była na wysokości odbytu. Przy zachowaniu odpowiedniej ostrożności i delikatności można ten zabieg wykonać u świni bez obawy, że będzie ona wykonywała ruchy obronne. Po włożeniu rurki, na wypadniętą prostnicę, tuż przy odbycie, zakładamy elastyczne gumki, robiąc możliwie wiele pętli, nakładając je na siebie. Silny ucisk gumek daje gwarancję, że rurka pozostanie w tej pozycji i nie wypadnie, a dopływ krwi do wypadniętej części prostnicy zostanie odcięty. Aby zapobiec infekcji należy podać antybiotyk o wydłużonym działaniu. Po 3 dniach należy odciąć skalpelem obumarłą część jelita (ok. 1 cm od założonych gumek), następnie usunąć gumki i wyciągnąć rurkę z odbytu. Elastyczna rurka gwarantuje nam odprowadzanie gazów z jelita, natomiast oddawanie przez nią kału jest ograniczone. Podanie środków przeczyszczających takich jak: sól Glauberska, otręby lub siemię lniane jest jak najbardziej wskazane.

POWRÓT DO LISTY

ZESTAW DO POBIERANIA PŁYNU USTNEGO

Oral Fluid – „OF” dla świń

☒ Łatwe i bezstresowe pobieranie materiału do diagnostyki

☒ Kontrola obecności i krążenia w stadzie:
PRRSV, PCV2, SIV, PEDV, *M. hyopneumoniae*, *M. hyorhinis*, *H. parasuis*, ...

☒ Wysoka czułość i specyficzność dostępnych testów ELISA i PCR



Zestaw zawiera:

- linę o długości 70 cm, Ø 16 mm
- stożkowy worek foliowy z probówką neutralną
- korek do probówki
- 2 x opaski kablowe
- sznurek długości 100 cm, Ø 3 mm
- 1 parę rękawiczek j. użytku



BASKO Aleksander Skoracki
ul. Ślirzeszyńska 33
60-479 Poznań

Tel.1 +48 61 829 94 10
Tel.2 +48 61 610 23 01
Fax +48 61 825 00 02
E-mail: basko@basko-vet.com
Internet: www.basko-vet.com



przechowywać w suchym i chodnym miejscu

Zestaw do pobierania płynu ustnego "OF" (Oral Fluid) u świń to:

- łatwe i bezstresowe pobieranie materiału do badań,
- kontrola obecności i krążenia w stadzie: PRRSV, PCV2, SIV, PEDV, *M. hyopneumoniae*, *H. parasuis* i innych drobnoustrojów,
- wysoka czułość i specyficzność dostępnych testów ELISA i PCR.

Zestaw zawiera:

- - linę o długości 70 cm, Ø 16 mm,
- - stożkowy worek foliowy połączony z probówką neutralną,
- - korek do probówki,
- - 2 x opaski kablowe i sznurek długości 100 cm, Ø 3 mm do mocowania liny,
- - 1 parę rękawiczek jednorazowego użytku,
- - instrukcję użycia.

POWRÓT DO LISTY

Zestaw sekcyjny do dużych zwierząt



Skład zestawu:

1. dłuto proste
2. młotek sekcyjny z hakowym uchwytem
3. młotek/toporek
4. nożyce kostne
5. nożyczki sekcyjne proste, jedno ostrze zakończone bulwą
6. nóż sekcyjny, typ Langenbeck
7. pęseta anatomiczna standard
8. piła ręczna sekcyjna

[POWRÓT DO LISTY](#)

Zestaw trokarowy do fiksacji trawieńca – komplet



Zestaw jest wykonany z nierdzewnego metalu i składa się z trokaru oraz dwóch stabilnych rurek trokarowych (kaniul). Służy do wprowadzania zawleczek fiksujących do trawieńca. Trokar z kaniulą wkuwa się przez powłoki brzuszne do światła trawieńca. Wyciąga trokar, a przez kaniulę, pomagając sobie przetyczką (brak w zestawie), wprowadza do trawieńca zawleczkę. W odległości pięciu do siedmiu centymetrów od pierwszego wkłucia za pomocą trokaru wprowadza się drugą kaniulę a następnie drugą zawleczkę. Po umieszczeniu obu zawleczek w trawieńcu wyjmuje się kaniule, stale trzymając nici zawleczek. Obie nici wiąże się z sobą, pozostawiając niewielki luz. Między nicią a skórą należy umieścić podkładkę, aby nić nie wrzyną się w skórę.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Zawlecзка do fiksacji trawieńca - kpl. (para)




Do fiksacji trawieńca służą specjalne zawlecзки z nitką, idealnie pasujące do średnicy kaniul z zestawu trokarowego. Zawlecзки wykonane są z metalu. Nitka zawlecзки z niewchłanianego materiału o grubości metrycznej „8” jest powlekana, co zabezpiecza przed wnikaniem płynów i drobnoustrojów w głąb rany.

Wymiary: $\varnothing = 4 \text{ mm}$; długość: 42 mm; długość nici: 25 cm

Opakowanie: dwie zawlecзки (para) w strunowym woreczku foliowym.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Zawleczka do fiksacji trawieńca wg Janowitza - kpl. 5 szt.

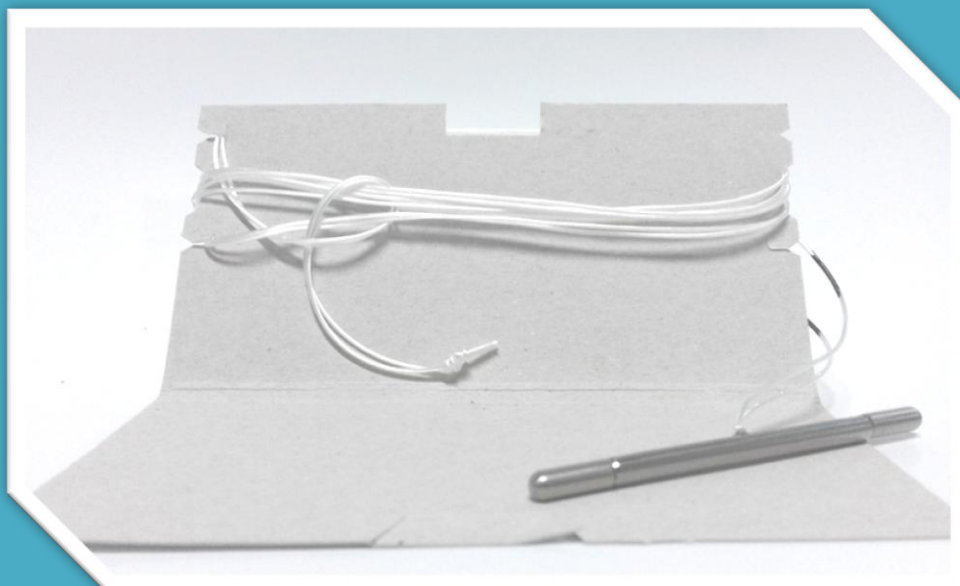

Zawleczka do fiksacji trawieńca wg Janowitza to wałeczek metalowy o długości 6 cm i średnicy 3 mm z przytwierdzonymi pośrodku dwoma nićmi z niewchłanialnego materiału o grubości metrycznej „7”, każda o długości 90 cm. Odpowiednia sztywność nitki pozwala na ich lepsze wyszukanie w jamie brzusznej w drugiej fazie operacji. Dla orientacji operującego na nitkach czarną obwódką zaznaczona jest odległość 5 cm od zawlecзки.

Opakowanie: 5 szt. zawleczek pakowanych pojedynczo, niesterylne.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Zgłębnik gumowy • 150 cm, Ø zewn. 12 mm



Zgłębnik z czerwonej bardzo elastycznej i wytrzymałej gumy. Koniec dalszy z pełnej gumy sprawia, że nie zagina się przy utrudnionym wprowadzaniu. Dwa asymetryczne otwory boczne pozwalają na wlewanie lub pobieranie płynu. Koniec bliższy posiada rozszerzenie ułatwiające np. osadzenie lejka. Może służyć jako sonda żołądkowa dla cieląt. Dla ochrony przed zgryzieniem można użyć osłony do sondy do wlewów dożwaczowych DC. Bardzo dobrze nadaje się także do lewarowania płynnej zawartości żołądka lub macicy.

Wymiary: 150 cm, Ø zewn. 12 mm

[POWRÓT DO LISTY](#)

Zgłębnik gumowy • 300 cm, Ø 10/16 mm • 250 cm, Ø 9/15 mm



Pomimo swej pozornej prostoty zgłębnik nosowo-żołądkowy wykonany z nieodpowiedniego materiału może stwarzać niebezpieczeństwo uszkodzenia pacjenta podczas jego wprowadzania. Zgłębnik Rüsch jest wyprodukowany z czerwonej bardzo elastycznej i wytrzymałej gumy. Cechy materiału oraz atraumatyczne wykończenie centralnego otworu zgłębnika pozwalają na jego łagodne wprowadzanie do gardła i żołądka, a pełna średnica otworu centralnego i podłużny otwór boczny ułatwiają wlewanie lub pobieranie płynu. Wahania temperatury zewnętrznej nie wpływają na zmianę elastyczności zgłębnika.

Wymiary: Ø 9/15 mm, długość 250 cm
 Ø 10/16 mm, długość 300 cm,

[POWRÓT DO LISTY](#)

Zestaw dr. Fritza do repozycji trawieńca metodą Janowitza



Zestaw do endoskopowej metody repozycji i fiksacji lewostronnego lub prawostronnego przemieszczenia trawieńca u bydła według Janowitza. Za pomocą zestawu dr. Fritza można wykonać minimalnie inwazyjny zabieg repozycji i fiksacji przemieszczonego trawieńca, co pozwala na szybki powrót zwierzęcia do zdrowia, bez konieczności stosowania antybiotyków. Zestaw dr. Fritza zapewnia lekarzowi weterynarii optymalne warunki do pracy z endoskopem, jest łatwy w obsłudze i konserwacji. Endoskop charakteryzuje się solidną budową, doskonałą jakością obrazu i odpowiednią długością roboczą. Zestaw mieści się w plastikowym futerale transportowym, który zapewnia instrumentom należyłą ochronę.

Zalety operacji wykonywanej metodą Janowitza:

- alternatywa dla klasycznej laparotomii
- oszczędza czas i zmniejsza koszty
- minimalna inwazyjność z dostępu przez ścianę jamy brzusznej
- nie wymaga zabezpieczenia antybiotykowego
- zapewnia szybki powrót do zdrowia i pełnej wydajności

Dodatkowe wyposażenie zestawu w zgłębnik Christiansena pozwala na jednoetapowe wykonanie operacji metodą Janowitza na zwierzęciu stojącym.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Buty jednorazowe foliowe Krutex z gumką –25 par



Ochraniacze na buty – foliowe, jednorazowe, długie z gumką

Ochraniacze na obuwie znajdują zastosowanie podczas inspekcji i wizyt w gospodarstwie, rzeźni, zakładach utylizacji zwierząt, budynkach inwentarskich, środków transportu i wszędzie tam, gdzie wymagane jest utrzymanie higieny i bioasekuracji.

Opis produktu:

- podwyższona wytrzymałość
- całkowita nieprzemakalność
- mocowanie za pomocą gumki
- materiał: folia przezroczysta,
- kolor: bezbarwny
- wymiary: (wys.) 53cm x (dł.) 38cm (grub.)70 μm =0,070 mm

Opakowanie: 5x5 par

[POWRÓT DO LISTY](#)

Czepek jednorazowy chirurgiczny



Okrągły czepek wykończony gumką, dobrze przepuszcza powietrze, duża średnica pozwala z łatwością schować także długie włosy. Materiał: włóknina polipropylenowa.

Kolor: zielony.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Fartuch ginekologiczny Krutex zielony 130, 140 cm



Zielony, 69% PVC / 31% nylon. Wodoodporny, łatwy w myciu i dezynfekcji, wykonany z materiałów najwyższej jakości. Rękawy ze ściągaczem gumowym, stójka. Fartuch zapinany jest z tyłu na podwójny rzep.

[POWRÓT DO LISTY](#)

Kalosze Dunlop® z ochroną stopy



Kalosze DANLOP® - sprawdzone w terenowej pracy lekarza weterynarii - zapewniają ochronę stopy, są wygodne, długotrwałe i estetyczne.

Purofort jest unikalną technologią firmy Dunlop stosowaną w produkcji butów gumowych. Technologia wykorzystuje piankę poliuretanową, która w procesie wytwarzania, pod wpływem wysokiego ciśnienia, zatrzymuje miliony drobniutkich pęcherzyków powietrza. Nadaje to kaloszom Purofort specyficzne właściwości:

- lekkość, 35 % lżejsze od zwykłych kaloszy,
- delikatność i sprężystość,
- elastyczność i giętkość, również w niskich temperaturach,
- bardzo dobrą termoizolacyjność,
- dużą odporność na ścieranie,
- odporność na działanie środków chemicznych,
- 2-3 krotnie dłuższy okres użytkowania,
- profil podeszwy pozwala na łatwe usuwanie brudu.

W części okrywającej palce stopy oraz w podeszwie zatopione są stalowe płytki, które nie wpływają negatywnie na komfort użytkowania, a chronią stopę przed urazami powodowanymi np. nadeptaniem przez zwierzę czy nastąpieniem na ostry przedmiot (gwóźdź). Para męskich kaloszy w rozmiarze 42 waży tylko ok. 1.800 g. Kolor buta - ciemnozielony a podeszwy - brązowy.

Kalosze dostępne są w rozmiarach: 37-48/49 oraz nowy model w rozmiarze 49/50.

ZOBACZ TAKŻE WERSJĘ ZIMOWĄ (kliknij na obrazek):



[POWRÓT DO LISTY](#)

Kalosze Dunlop® Thermo Plus



Kalosze DANLOP® Thermo Plus - wersja zimowa, zachowują właściwości termoizolacyjne nawet w -40°C, sprawdzone w terenowej pracy lekarza weterynarii - zapewniają ochronę stopy, są wygodne, długotrwałe i estetyczne.

Purofort jest unikalną technologią firmy Dunlop stosowaną w produkcji butów gumowych. Technologia wykorzystuje piankę poliuretanową, która w procesie wytwarzania, pod wpływem wysokiego ciśnienia, zatrzymuje miliony drobniutkich pęcherzyków powietrza. Nadaje to kaloszom Purofort Thermo Plus specyficzne właściwości:

- lekkość, 35 % lżejsze od zwykłych kaloszy,
- delikatność i sprężystość,
- elastyczność i giętkość, również w niskich temperaturach,
- bardzo dobrą termoizolacyjność (-40°C !),
- dużą odporność na ścieranie,
- odporność na działanie środków chemicznych,
- 2-3 krotnie dłuższy okres użytkowania,
- profil podeszwy pozwala na łatwe usuwanie brudu,
- rozbudowane protektory podeszwy zapobiegają poślizgnięciu w warunkach zimowych.

W części okrywającej palce stopy oraz w podeszwie zatopione są stalowe płytki, które nie wpływają negatywnie na komfort użytkowania, a chronią stopę przed urazami powodowanymi np. nadeptaniem przez zwierzę czy nastąpieniem na ostry przedmiot (gwóźdź). Kolor buta - ciemnozielony a podeszwy - czarny.

Kalosze dostępne są w rozmiarach: 37/38, 39/40, 41, 42, 43, 44/45, 46, 47 i 48

[ZAPYTAJ O CENĘ U SPRZEDAWCY!](#)

[POWRÓT DO LISTY](#)

Kombinezon ochronny zielony lub biały



Trwały i wytrzymały. Materiał: PP. Zapinany na suwak. Posiada kaptur. Nogawki i rękawy zakończone gumką. Zwykle używany jako odzież jednorazowego użytku, ale może być też kilka razy prany.

Pakowany pojedynczo.

Rozmiary: M, L, XL, XXL

[POWRÓT DO LISTY](#)

Kombinezon Weterynaryjny



Kombinezon weterynaryjny MEDVET - zapewnia estetyczny wygląd i idealnie sprawdza się w pracy terenowego lekarza weterynarii.

Uszyty z tkaniny zawierającej 35% bawełny i 65% dakronu, zapewnia wysoki komfort noszenia.

Główne zalety to:

- odporna tkanina w kolorze ciemnozielonym,
- estetyczne wykonanie,
- łatwy do zakładania,
- nie krępuje ruchów,
- odejmowane rękawy (zamek błyskawiczny),
- impregnacja tkaniny znacznie redukuje przyjmowanie brudu, zapachów i wody,
- łatwy do pielęgnacji (po praniu powieszony z wodą nie wymaga prasowania),
- elastyczny ściągacz w talii dopasowujący do figury,
- odpowiednia ilość kieszeni,
- zapinany na wytrzymałe plastikowe zamki błyskawiczne i rzepy.

Kombinezony dostępne są w rozmiarach:

- | | |
|-----|------------------------------|
| XXS | - odpowiada rozmiarowi 38/40 |
| XS | - odpowiada rozmiarowi 42/44 |
| S | - odpowiada rozmiarowi 46/48 |
| M | - odpowiada rozmiarowi 50/52 |
| L | - odpowiada rozmiarowi 54/56 |
| XL | - odpowiada rozmiarowi 58 |
| XXL | - odpowiada rozmiarowi 60 |

[POWRÓT DO LISTY](#)

Rękawice jednorazowego użytku



Nitrylowe bezpudrowe: M, L, XL



Winyłowe pudrowane: M, L, XL

W naszej ofercie mamy rękawice:

- lateksowe
- nitrylowe
- winylowe

Kształt: uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń

Rozmiary: M (7-8), L (8-9), XL (9-10)

Opakowanie jednostkowe zawiera 100 sztuk rękawic

[POWRÓT DO LISTY](#)

Antycit– BOVERA® - 400 g torba



Antycit BOVERA® jest mieszanką paszową mineralną stabilizującą pH dla krów z kwasicią żołądka.

Zakres zastosowania:

- pozwala na szybką i wydłużoną neutralizację nadmiaru kwasów w żwaczu
- działa osłaniająco na śluzówkę jelita
- posiada zdolność absorpcji toksyn
- przywraca i stymuluje prawidłową pracę przewodu pokarmowego
- zapobieganie zaleganiu poporodowemu krowy
- zapobiega zatrzymaniu łożyska
- zwiększa odporność na infekcje

Skład:

- wapienne algi morskie
- wodorowęglan sodu
- tlenek magnezu
- *Plantagoovata*
- drożdże suszone (*Saccharomyces cerevisiae*)

Składniki analityczne i poziomy:

- wapń: 12%
- sód: 7%
- magnez: 9,4%
- fosfor: 0,17%

[POWRÓT DO LISTY](#)

Antydiarr - BOVERA® - 600 g torba



Antydiarr BOVERA® to mieszanka paszowa uzupełniająca mineralna dla krów z zaburzeniami trawienia i biegunką.

Zakres zastosowania:

- łagodzenie stanów biegunkowych
- regeneracja i stabilizacja flory żwacza
- neutralizowanie silnych kwasów
- osłona śluzówki jelit
- przeciwdziałanie odwodnieniu organizmu przy bieguncie
- przeciwdziałanie ubytkowi soli mineralnych

Skład:

- węglan wapnia
- kora dębu
- drożdże suszone (*Saccharomyces cerevisiae*)

Składniki analityczne i poziomy:

- wapń: 20,00%
- sód: 0,75%
- magnez: 0,12%
- fosfor: 0,14%

[POWRÓT DO LISTY](#)

Diaretum - BOVERA® - 400 g torba



Diaretum BOVERA® to mieszanka paszowa mineralna dla krów z zaburzeniami trawienia i biegunką.

Zakres zastosowania:

- przeciwdziała zmniejszeniu przyjmowania paszy
- wspomaga zachowanie równowagi wodno-elektrolitowej
- zmniejsza ryzyko zaburzeń trawienia podczas i po przebytych zatruciach i biegunkach
- działa osłaniająco na wątrobę
- dostarcza szybko przyswajalnej energii

Skład:

- cukier
- chlorek sodu
- chlorek potasu
- propionian wapnia
- siarczan magnezu

Składniki analityczne i poziomy:

- wapń: 0,9%
- sód: 15%
- magnez: 0,12%
- fosfor: <0,06%

[POWRÓT DO LISTY](#)

Fermentit - BOVERA® - 600 g torba



Fermentit BOVERA® jest mieszanką paszową mineralną dla cieląt przeżuujących, jałówek i krów z zaburzeniem procesów fermentacyjnych w żwacu.

Zakres zastosowania:

- hamuje powstanie pienistej treści w żwacu
- normalizuje proces trawienia i gospodarkę elektrolitową
- jednokrotne podanie umożliwia powrót do normalnego żywienia

Skład:

- propionian wapnia
- cukier
- siarczan magnezu
- chlorek sodu
- chlorek potasu
- drożdże suszone (*Saccharomyces cerevisiae*)

Składniki analityczne i poziomy:

- wapń: 9,7%
- sód: 4,6%
- magnez: 1,6%
- fosfor: <0,06%

[POWRÓT DO LISTY](#)

Krodigest - BOVERA® - 600 g torba



Krodigest BOVERA® jest mieszanką paszową mineralną dla krów z osłabionym apetytem i / lub niestrawnością.

Zakres zastosowania:

- pobudza wydzielanie śliny i poprawia apetyt
- poprawia procesy trawienia
- reguluje przemianę materii
- zalecana dla krów produkujących duże ilości mleka
- zapobiega utracie apetytu spowodowanego m.in. zapaleniem wymienia lub macicy
- zapobiega utracie apetytu poprzez zaburzenia metaboliczne

Skład:

- propionian wapnia
- siarczan magnezu
- chlorek potasu
- drożdże suszone (*Saccharomyces cerevisiae*)
- sproszkowane kłącze goryczki

Składniki analityczne i poziomy:

- Wapń 14%
- Sód 0,026%
- Magnez 2,3%
- Fosfor <0,06

[POWRÓT DO LISTY](#)

Puerperal - BOVERA® - 600 g torba



Puerperal BOVERA® to mieszanka paszowa mineralna dla krów świeżo po wycieleniu.

Zakres zastosowania:

- Puerperal jest nośnikiem aktywnych składników mineralnych i pokarmowych
- dostarcza wapń i magnez, zmniejsza deficyt energii
- nawadnia organizm i stymuluje perystaltykę żwacza w okresie okołoporodowym
- skutecznie zapobiega chorobom w okresie poporodowym, utracie apetytu i zaburzeniom w laktacji
- przeciwdziała lewostronnemu przemieszczaniu się trawieńca

Skład:

- propionian wapnia
- siarczan magnezu
- drożdże suszone (*Saccharomyces cerevisiae*)

Składniki analityczne i poziomy:

- wapń: 15%
- sód: 0,016%
- magnez: 2,4%
- fosfor: 0,1%

[POWRÓT DO LISTY](#)

Canivera-Provital - 400 g puszka



Canivera-Provital zawiera biologicznie aktywne proteiny, które efektywnie hamują stany zapalne. Dzięki obecności czynnych immunoglobulin stymuluje mechanizmy obronne organizmu. Jest źródłem łatwo przyswajalnych białek i węglowodanów, co ma znaczenie szczególnie u zwierząt z dysfunkcjami przewodu pokarmowego. Wzmaga przyswajalność składników pokarmowych i wykorzystanie energii oraz poprawia jakość kału. Przyspiesza proces zdrowienia i zwiększa vitalność. Cechuje się dużą atrakcyjnością smakowo-zapachową. Stymuluje i poprawia przyjmowanie karmy w okresie choroby i rekonwalescencji. Przygotowany w formie kleiku może stanowić zastępczą dietę u zwierząt mających problemy z przyjmowaniem stałego pokarmu.

Skład:

- dekstrynizowana skrobia
- białka plazmy krwi zwierzęcej
- białka pszenne

Składniki analityczne i poziomy:

- | | |
|---------------------------|-------|
| • białko surowe | ≥ 25% |
| • włókno surowe | < 1% |
| • oleje i tłuszcze surowe | < 1% |
| • popiół surowy | < 5% |

Opakowanie: puszka zawiera 400 g preparatu

[POWRÓT DO LISTY](#)



Dietetyczny dodatek dla cieląt zapewniający stabilizację gospodarki wodno-elektrolitowej. DIAVET przeznaczony jest dla cieląt wykazujących zaburzenia pokarmowe w postaci biegunek. Działa kompleksowo - stabilizuje gospodarkę wodno-elektrolitową, chroni śluzówkę jelita, wiąże toksyny, zaopatruje organizm w podstawowe składniki pokarmowe.

Produkt zawiera:

• popiół surowy	13,8 %
• białko surowe	2,0 %
• włókno surowe	1,8 %
• oleje i tłuszcze	1,1 %
• wapń	0,0 %
• sód	3,8 %
• magnez	1,25 %
• fosfor	0,0 %

Preparat o działaniu przeciwbiegunkowym i zapobiegającym odwodnieniu zawiera w swoim składzie: oczyszczone mukopolisacharydy, glukozę, kwaśny węglan sodu, attapulgit aktywowany, chlorek sodu, chlorek potasu oraz dodatkowo: zasadowy węglan magnezu, amid niacyny i substancje aromatyczne.

Stosowanie:

przy wyraźnej biegunce podajemy DIAVET w zastępstwie mleka lub preparatu mlekozastępczego dwa razy dziennie w odstępie ok. 12 godzin. Jednorazową dawkę w ilości 4 miarek (ok. 50 g) rozpuszcza się w 2-3 litrach wody (38-40 °C) i podaje cielęciu do wypicia. Czynności powtarza się następnego dnia. W ciągu dnia należy cielęciu umożliwić dostęp do wody do picia. Po zauważeniu poprawy należy stopniowo powracać do normalnego karmienia. W cięższych stanach można podawać mleko lub preparat mlekozastępczy w odstępie kilku godzin po podaniu preparatu DIAVET. W stadach, w których często dochodzi do zaburzeń pokarmowych z objawami biegunki, należy, w krytycznym dla cieląt okresie, dodawać po jednej miarce preparatu DIAVET do każdego karmienia przez 6-10 dni.

Uwaga! Nie stosować równocześnie z preparatami spazmolitycznymi. Nie powinno się jednocześnie podawać innych preparatów elektrolitowych.

Dostępne opakowania: puszka 400 g, puszka 1 kg, wiaderko 2,5 kg

Mammoderm

Balsam do pielęgnacji gruczołu mlekowego u bydła, koni, świń, owiec, kóz i psów



Preparat pielęgnacyjny o działaniu chłodząco-tonizującym i przeciwobrzękowym. Jest konsystencji galaretowatej, dobrze się rozprowadza, wchłania i zmywa z powierzchni skóry.

Zawiera w swoim składzie: kamforę, salicylan metylu, petrolatum, alkohol izopropylowy, karbomer, ci 16255, wodorotlenek sodu i wodę.

Mammoderm przeznaczony jest do masażu wymion. Stosowany na skórę działa chłodząco i tonizująco. Łagodzi skutki silnego nadwyrężenia gruczołu u krów mamek, przy dużych miotach, długim okresie karmienia, w wyniku obrzęku okołoporodowego, zalegania, kulawizny itp. Ułatwia masaż w stanach zapalnych wymienia.

Sposób użycia: stosować zewnętrźnie. Po dokładnym oczyszczeniu i osuszeniu wymienia preparat należy trzy razy dziennie nanosić na skórę wymienia (i strzyków) oraz dokładnie wmasować.

Przechowywać w temperaturze pokojowej w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Unikać kontaktu z oczami i błoną śluzową. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Okres karencji nie obowiązuje.

Opakowanie: butelka plastikowa 1000 ml

[POWRÓT DO LISTY](#)

Virocid (5l)



Virocid®

Doskonały produkt dezynfekcyjny

- Najskuteczniejszy środek dezynfekcyjny
- Potwierdzona skuteczność na całym świecie (normy EN i AOAC)
- Powszechnie zalecany do zwalczania ognisk chorobowych

Skład gwarantujący synergizm działania

- 2 różne czwartorzędowe związki amonowe (jeden jednołańcuchowy: chlorek aliklodimetylobenzyloamonium, oraz jeden dwułańcuchowy: chlorek didecyldimetyloamonium), tak więc rozszerzone spektrum działania tej grupy związków
- Glutaral
- Izopropanol
- Olejek sosnowy

Bezpieczny w stosowaniu

Bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze i sporobójcze działanie produktu Virocid® jest unikalnym rozwiązaniem na skalę światową, Bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Virocid® ma udokumentowaną skuteczność

Od wielu lat Virocid® ma udokumentowaną skuteczność w zapobieganiu i zwalczaniu ognisk tak groźnych chorób jak: klasyczny pomór świń, pryszczycza, ptasia grypa H5N1, wirus grypy A/H1N1, afrykański pomór świń (ASF)

Virocid® jest idealnym partnerem chroniącym przed chorobami przewodu pokarmowego jak Campylobacter i 5 serotypom Salmonella opisanym w Rozporządzeniu (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność.

Zastosowanie

- Może być stosowany w formie oprysku, piany lub zamgławiania bez dodawania specjalnych nośników lub wzmacniaczy
- Ze względu na jego wyszukany i stale udoskonalany skład Virocid® może być stosowany w bardzo niskich stężeniach.

Virocid® ma bardzo wszechstronne zastosowanie. Może być wykorzystywany w: hodowli zwierząt (drób, świnie, bydło, ...), ogrodnictwie, akwakulturze, higienie osobistej.

Sposób użycia

- W pierwszej kolejności dokładnie umyć powierzchnie
- Dezynfekcja:
- czas kontaktu: 15 minut
- stosować Virocid® w stężeniu od 0,25-05% (1:400-1:200) w formie oprysku lub piany (zalecane zużycie: 1 litr roztworu na 4m² powierzchni)
- zamgławianie: 1-2 litrów produktu (Virocid® + 4 litry wody na 1000m³)
- brodzik / maty dezynfekujące: 0,5-1,0% regularnie wymieniać roztwór
- dezynfekcja pojazdów przeznaczonych do transportu zwierząt: 0,25-1,0%

[POWRÓT DO LISTY](#)

Zamawiaj już teraz, kliknij na poniższy obrazek, by otworzyć okno edytowania wiadomości Outlook:

Zamawiam...

lub wejdź na swoją pocztę e-mail na jednym z popularnych portali, wystarczy kliknąć na odpowiadającą Tobie ikonę, by przejść do okna logowania, nasz adres to: basko@basko-vet.com .



Do przesyłki poniżej 500,00 zł wartości faktury netto doliczane są koszty dostawy.
Opisy artykułów wraz ze zdjęciami znajdują się w Internecie na www.basko-vet.com.
Zamówienia można składać telefonicznie, mailowo lub faksem.

Tel.1.: 61 224 62 99
Tel.2.: 61 610 23 01
Tel.3.: 61 829 94 10
Kom.: 698 486 066
Fax.: 61 825 00 02
Mail: basko@basko-vet.com

[POWRÓT DO LISTY](#)